


歯科材料 09 歯科用切削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

CN CAD/CAMミリングバー

*【形状・構造及び原理等】

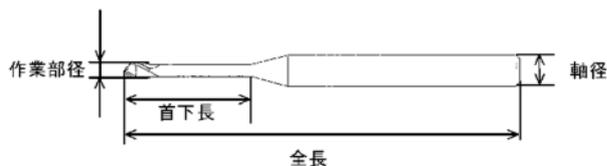

品番	作業部径	首下長	軸径	全長
DC0.6	φ0.6mm	6.0mm	φ4.0mm	50.0mm
DC1.0S	φ1.0mm	10.0mm		
DC1.0	φ1.0mm	12.0mm		
DC2.0	φ2.0mm	16.0mm	φ3.0mm	52.0mm
DC1.0W	φ1.0mm	8.0mm		

材質: 超硬合金

ダイヤモンドコーティング(作業部)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社カム・ネッツ

住所: 〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電話番号: 072-966-4180

FAX番号: 072-963-0100

E-Mail: info@come-nets.net

【使用目的又は効果】

歯科材料を切削・研削加工するために用いる研削器材で、専用の歯科用CAD/CAMマシンに装着して使用する。

【使用方法等】

- 1) 歯科用CAD/CAMマシンに本品を取り付ける。
- 2) コンピューターから加工データを送信し、切削加工を行う。

【使用上の注意】

- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・変形、破損、腐食などがあるものは使用しないこと。
- ・本品の加工、改造は行わないこと。
- ・本品の使用中に異常な振動や異音が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・本品は刃物であるため、取り扱いには充分注意すること。
- ・2種類以上の材料を加工する場合は、材料ごとにそれぞれ別の本品を用意して使用すること。異なる材料の切削屑が付着したまま加工を行うと、切削不良の原因になります。
- ・破損の原因となるため、次の行為は行わないこと。
 - ① 作業部を持つ
 - ② 作業部に衝撃を与える
 - ③ 作業部を変形させる

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・高温・多湿の場所を避け、ケースに入れた状態で保管すること。