

器 69 歯科用蒸和器及び重合器  
一般医療機器 歯科技工用成型器 JMDN70750010

## ジェットパック

### 【形状、構造及び原理等】

寸法：W300mm×D270mm×H610mm

重量：31Kg

原理：本機に圧搾空気または窒素ガスを流入させ、圧力を利用して義歯床材料を射出成型することにより所定の形状に成型する。

### 【使用目的又は効果】

義歯床用材料を本機より射出成型し、義歯床又は補綴物を作製する装置である。

### 【使用方法等】

- 1) 通法のとおり脱ろうの完成した歯科用フラスコを本機のフラスコテーブルに設置する。
- 2) 義歯床用レジン装填したシリンダーを歯科用フラスコに設置する。
- 3) 本機のエアシリンダースイッチを操作し、歯科用フラスコに義歯床用レジン射出成型する。
- 4) 通法に従い義歯床を取り出し、研磨を完成する。

### 【使用上の注意】

- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・本機は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E-M a i l : info@come-nets.net

外国製造所：ディーケームンギョウコーポレーション

DK MUNGYO CORPORATION

国 名：大韓民国