

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科用硬質石こう JMDN70897020

## CAD/CAM-プラスターディスク

### 【形状、構造及び原理等】

主成分：半水石こう、その他

ディスク状でサイズは下記の 3 種類がある。

φ 98.5×20mm

φ 98.5×25mm

φ 98.5×30mm

### 【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質石こう。

### 【使用方法等】

- ①スキャニングマシンで計測したデータを基に CAD ソフトウェアを用い模型のミリングデータを作成する。
- ②本品をミリングマシンに設置し、ミリングデータを用いて加工を行う。
- ③加工終了後、本品から模型を切り離し、切り離した部分を整える。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ①本品の硬化体を研削する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
  - ②本品の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどの防具を使用すること。
  - ③本品は、【使用目的又は効果】の項の用途以外には使用しないこと。
  - ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

#### 2) 重要な基本的注意

本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネット

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1-17-12

電 話 番 号：072(966)4180

F A X 番 号：072(963)4182

E・M a i l：info@come-nets.net

製 造 業 者：ディーケー ムンギョウ コーポレーション

DK MUNGYO CORPORATION

国 名：大韓民国