

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

イヴ ダイアセラツイスト

【形状、構造及び原理等】

成分：作業部…アルミナ質研削材、合成ゴム
軸部…ステンレス鋼

形状：作業部の大きさの違いにより 3 種がある。
砥粒の粒度の違いにより、それぞれにミディアム、フ
ァインの 2 種がある。

タイプ	用 途	サイズ (直径×厚さ)	軸 部
ミディアム	中研磨用	14×1.6mm 17×1.6mm 26×2.0mm	HP 用 RA 用
ファイン	仕上研磨用	14×1.6mm 17×1.6mm 26×2.0mm	HP 用 RA 用

※RA 用サイズは 14×1.6mm のみ

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住 所：〒578-0903
大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号
電 話 番 号：072-966-4180
F A X 番 号：072-963-4182
E・M a i l：info@come-nets.net
外国製造所：イヴ
(EVE Ernst Vetter GmbH)
国 名：ドイツ

【使用目的又は効果】

ゴム基材にアルミナ質研削材を含有するブラシ状の形態をも
つ研磨材。ジルコニア等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用ハンドピース等に装着する。
- 2) 歯科用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 3) 回転させた本品を被研磨物に押し当て、研磨を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャン
クを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認
すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ①20,000rpm（HP 用）の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しない
こと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、
局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用す
ること。
- ⑤本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途
以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。