

医 04 整形用品  
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 JMDN70914000

# CN-スプリント

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・成形品は30日を超えて使用しないこと。

## 【形状、構造及び原理等】

形状：正方形

寸法：127 mm×127 mm

厚さ：0.5 mm、0.8 mm、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm

成分：ポリエチレンテレフタレート

## 【使用目的又は効果】

本材は歯科用咬合スプリントを作製するために用いる。  
ただし使用期間が30日を超えないものに限る。

## 【使用方法等】

- 1) 本品を歯科技工用成型器の使用・操作方法に従って、所定の場所にセットする。
- 2) 石こう模型を歯科技工用成型器の所定の場所にセットする。
- 3) 歯科技工用成型器にセットされた本品を加熱し、軟化したら加圧成形する。
- 4) 冷却後、歯牙模型から成形品を取り外し、余剰部分をトリミングする。
- 5) 辺縁等を研磨する。

## 【使用上の注意】

- ・本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ・本品より作製した成形品の使用期間は、30日を超えないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電話番号：072-966-4180

FAX番号：072-963-4182

E-Mail：info@come-nets.net