

\*2026年2月改定(第2版)

2019年01月15日作成(新様式第1版)

届出番号: 27B2X00281000208

歯 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## CNニューレーズブラシ

### \*【形状、構造及び原理等】

形状: 中心軸部から豚毛を植立させたブラシ状研磨材。豚毛の植立量により、以下の3種がある。

1行 Vカット…直径 62mm

1行…直径 58mm

2行…直径 62mm

3行…直径 70mm

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

主にレジン床義歯のレーズ研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科技工用レーズに装着して用いる。

### 【使用上の注意】

- ①3,400rpmの回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社カム・ネッツ

住 所: 〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号: 072-966-4180

F A X 番 号: 072-963-4182

E-M a i l : info@come-nets.net