

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう JMDN70897020

CNインプレッションロック

【形状、構造及び原理等】

主成分：半水石こう、その他
形状：粉末状

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石こう。
主に石こう模型の作製に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品 100g に対し、水 20mL で練和して下さい。
- 2) 練和は 30～60 秒間均一になるまで行います。
- 3) 歯科用パイプレータ等で振動を与えながら、印象に注入します。
- 4) 注入後、30 分で硬化した模型を取り出します。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・ 本品を扱う際（硬化体を研削する場合も含む。）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - ・ 本品の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどの防具を使用すること。
 - ・ 本品は、【使用目的又は効果】の項の用途以外には使用しないこと。
 - ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・ 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 本品は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・ 開封後は密閉して保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住 所：〒578-0903
大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号
電 話 番 号：072(966)4180
F A X 番 号：072(963)4182
E・M a i l：info@come-nets.net
*外国製造所：ムンギョウ コーポレーション
Mungyo Corporation
国 名：大韓民国