


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

CNダイヤモンドポリッシャー

【形状、構造及び原理等】

形状・構造：

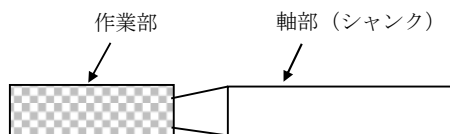

* 名称	作業部	軸部
DG128	φ 3×6mm	HP 用
DG129	φ 3×7mm	
DG143	φ 3×6mm	
DG131	φ 3×6mm	
DG120	φ 4×12mm	
DG512	φ 5×12mm	
DG613	φ 6×13mm	
DG119	φ 5×2mm	
DG142	φ 7×4mm	
DG112	φ 4×10mm	
DG110	φ 5×12mm	
DG111	φ 2×13mm	
DG211	φ 13×3mm	
DA128	φ 3×6mm	RA 用
DA129	φ 3×7mm	
DA146	φ 3×6mm	
DA131	φ 3×6mm	

材質： 作業部…アルミナ質研削材、合成ゴム
軸部…ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ゴム基材にアルミナ質研削材を含有するポイント状、ホイール状の形態をもつ研磨材。ジルコニア等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用ハンドピース等に装着する。
- 2) 歯科用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 3) 回転させた本品を被研磨物に押し当て、研磨を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ・ 12,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ・ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ・ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ・ 本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住 所：〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目17番12号
電 話 番 号：072-966-4180
F A X 番 号：072-963-4182
E・M a i l：info@come-nets.net
外国製造所：レコデント インターナショナル
(Reco-Dent International Co.,Ltd.)
国 名：台湾