

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNポリッシングサンド2

【形状、構造及び原理等】

形状：粉末状

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。主にスルホン床又はレジン床義歯の研磨に用いる。

【使用方法等】

本品に水を加えて泥状にし、義歯床に塗り、ブラシ等で研磨をする。

【使用上の注意】

- ・ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ・ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ・ 本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネット

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社