


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNペーパーコーン

【形状、構造及び原理等】

形状・構造：

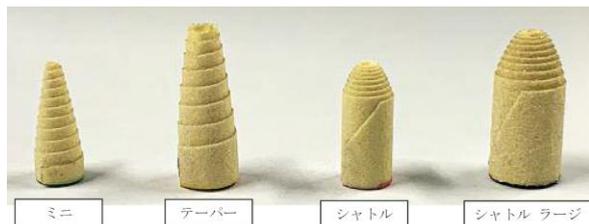

名称	全長	直径（最大径）
ミニ	16mm	φ 6～8mm
テーパー	20mm	φ 7～9mm
シヤトル	17mm	φ 6～8mm
シヤトル ラージ	19mm	φ 7～9mm

アルミナ粒子の粒度の違いにより、4形態それぞれ極荒、荒、中、細の4種がある。

材質：アルミナ質研磨材、紙

【使用目的又は効果】

アルミナ粒子を接着させた紙を円錐状又は砲弾状に巻いた研磨材。レジン材料、歯科用金属等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用マンドレルに装着する。
- 2) これを歯科技工用ハンドピース等に装着する。
- 3) 歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 4) 回転させた本品を被研磨物に押し当て、研磨を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・ ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ・ 予め予備回転させて、振れないことを確認すること。
- ・ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 長時間の連続使用は熱を帯びることがあるので、断続的に使用すること。

【使用上の注意】

- ・ 8,000rpmの回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
- ・ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ・ 本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

- ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 湿気を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

製 造 元：メディカル技研株式会社