


歯 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## CNクイックシャイン

### 【形状・構造及び原理等】

形状・構造：

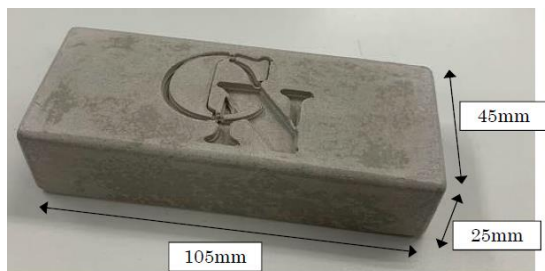

材質：酸化アルミニウム、油脂

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 火気厳禁で直射日光を避けた室温 40℃以下の場所で保管すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

### 【使用目的又は効果】

補綴物等のつや出し研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 本品を技工用ハンドピース又は技工用レーズに取り付けたバフホイール又はブラシ、ペーパーコーン等に押し当て塗布する。
- 2) 本品を塗布したバフホイール又は、ブラシ、ペーパーコーン等を回転させて、補綴物の表面に軽く押しあてながら研磨、艶出しをする。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・ 研磨後は加工物に本品が微量に付着しているため、バフ用クリーナー等できれいに洗浄して除去すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ・ 本品の使用中は、目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
  - ・ 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ・ 本品を使用して研磨する際には、局所排気装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
  - ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
  - ・ 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。