


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

CN CAD/CAMミリングバー ファインカット

【形状、構造及び原理等】

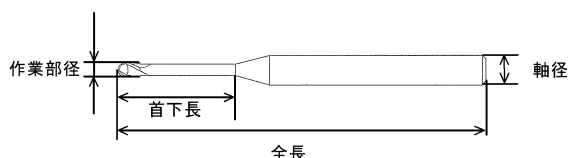

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住 所：〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目17番12号
電 話 番 号：072-966-4180
F A X 番 号：072-963-4182
E・M a i l：info@come-nets.net

品番	作業部径	首下長	全長	軸径
0.4	φ 0.4mm	6mm	50mm	φ 4.0mm
0.6	φ 0.6mm	8mm		
0.8	φ 0.8mm	12mm		
1.0	φ 1.0mm	10mm		
2.0	φ 2.0mm	16mm		

材質：超硬合金

ダイヤモンドコーティング（作業部）

【使用目的又は効果】

歯科材料を切削・研削加工するために用いる研削器材で、専用の歯科用CAD/CAMマシンに装着して使用する。

【使用方法等】

- 1) 歯科用CAD/CAMマシンに本品を取り付ける。
- 2) コンピューターから加工データを送信し、切削加工を行う。

【使用上の注意】

- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・変形、破損、腐食などがあるものは使用しないこと。
- ・本品の加工、改造は行わないこと。
- ・本品の使用中に異常な振動や異音が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・本品は刃物であるため、取り扱いには充分注意すること。
- ・2種類以上の材料を加工する場合は、材料ごとにそれぞれ別の本品を用意して使用すること。異なる材料の切削屑が付着したまま加工を行うと、切削不良の原因になります。
- ・破損の原因となるため、次の行為は行わないこと。
 - ① 作業部を持つ
 - ② 作業部に衝撃を与える
 - ③ 作業部を変形させる

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・高温・多湿の場所を避け、ケースに入れた状態で保管すること。