

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストニングワックス JMDN16189000

CNクラウンワックス

【形状、構造及び原理等】

成分：パラフィンワックス、蜜ろう、その他
色調の違いにより、以下の2色がある。

- ・グレー
- ・グリーンソフト

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。

【使用方法】

- ①技工用ガスバーナー、電気ポット等により液状化させて下さい。
- ②適量を取り出し、支台歯に盛り上げ、ロウ型を作製して下さい。
- ③ロウ型の作製は歯科技工の通法に従い作業して下さい。

【使用上の注意】

- ①本品は可燃物であるので使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ②本品は、【使用目的又は効果】に記載した用途以外には使用しないこと。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。他の製品と混用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温にて保管すること。
- ・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火設備を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネット

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1-17-12

電話番号：072(966)4180

FAX番号：072(963)4182

E-Mail：info@come-nets.net

製造元：クエスト デンタルマテリアルコーポレーション
QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION

国 名：フィリピン