

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNマスターサンド

【形状、構造及び原理等】

形状：粉末状

【使用目的又は効果】

義歯床の研削及び研磨に用いる。

【使用方法等】

- ① 水を加えて泥状にする。
- ② 義歯研磨部分に①を少量盛り付け研磨する。
- ③ 研磨作業中に研磨効率が下がった場合には再び①を盛り付ける。
- ④ 研磨作業終了時に①を水で流し清掃する。

【使用上の注意】

- ・ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ・ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ・ 本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 開封後は密閉して保管する。
- ・ 高温、多湿の場所を避けて保管する。
- ・ 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住 所：〒578-0903
大阪府東大阪市今米1丁目17番12号
電 話 番 号：072-966-4180
F A X 番 号：072-963-4182
E-M a i l : info@come-nets.net