

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

CNワックスディスク craft

【形状・構造及び原理等】

ディスク状でサイズは下記の種類がある。

- φ 98×14mm
- φ 98×20mm

主成分：ポリエチレンワックス、天然ワックス、色素

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 - 1 7 - 1 2

電 話 番 号：072 (966) 4180

F A X 番 号：072 (963) 4182

E - M a i l：info@come-nets.net

製 造 業 者：QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION

(PHILIPPINES)

【使用目的、効能又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴物のろう型作製のキャスティングワックスである。

【使用方法等】

- ① CAD／CAM装置で本品を切削加工する。
- ② 通法に従い、埋没し、鋳造、研磨を行う。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ① 本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ② 本品は、使用目的に記載した用途以外には使用しないこと
- ③ 本品を使用中にまたは使用前に異物混入などの不具合が生じた場合は直ちに使用を中止すること。
- ④ 研削物等の微粉が人体（目、口など）に入った場合、直ちに作業を中止し、即座に多量の流水で洗浄し専門医を受診すること。
- ⑤ 本品を焼却の際は、密閉された部屋での作業を避け、換気扇など排気装置のもと換気し、煙や蒸気を吸入しないこと。
- ⑥ クリストバライト系埋没材使用の際は急激な加熱を避け、ワックスパターンは1mm以上の間隔をあけ植立すること。
- ⑦ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ① 常温保管
- ② 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ③ 使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ④ 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量保管しないこと。
- ⑤ 本品は、水分や、酸・アルカリなどの腐食性薬剤、蒸気の暴露を避けて保管すること。
- ⑥ 物理的な負荷などの外圧や汚染を受けないように保管すること。
- ⑦ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。