

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

EVEダイアコン

【形状、構造及び原理等】

形状：

ホイール		
		
DI-L26m	DI-R22m	DI-R17m
Φ26.0mm	Φ22.0mm×3.0mm	Φ17.0mm×2.9mm
ポイント		
		
DI-13m		
Φ4.0mm×10.0mm		

成分：作業部…合成ダイヤモンド、ポリウレタン
軸部…ステンレス鋼

【使用上の注意】

- ① 15,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ② 損傷、変形（表面キズ、曲がり）等のあるものは使用しないこと。
- ③ 目の損傷を防ぐため、保護めがね等を使用すること。
- ④ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤ 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・高温多湿を避け、直射日光や水のかかるおそれのない場所で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住 所：〒578-0903
大阪府東大阪市今米1丁目17番12号
電 話 番 号：072-966-4180
F A X 番 号：072-963-0100
E-M a i l：info@come-nets.net
外国製造所：イヴ
EVE Ernst Vetter GmbH
国 名：ドイツ

【使用目的又は効果】

ゴム基材に合成ダイヤモンド研削材を含有するポイント状、ホイール状の形態をもつ研磨材。ガラスセラミックス、ジルコニア、陶材等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科技工用ハンドピース等に装着する。
- 2) 歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 3) 回転させた本品を歯科技工物等に押し当て、研磨を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ① ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ② 予め予備回転させて、振れないことを確認すること。
- ③ 無理な角度、過度の加圧での使用は避ける事。