

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

EVEダイアセラミックペースト

【形状、構造及び原理等】

形状：ペースト状



成分：合成ダイヤモンド、ポリエチレングリコール、その他

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材。
ガラスセラミックス、硬質レジン、ジルコニア、陶材等のつや出し研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を技工用ハンドピース又は技工用レーズに取り付けたパフホイール又はブラシ等に押しあて塗布する。
- 2) 本品を塗布したパフホイール又はブラシ等を、補綴物の表面に軽く押しあてながら仕上げ研磨をする。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・ 研磨後は加工物に本品が微量に付着しているため、パフ用クリーナー等できれいに洗浄して除去すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・ 本品の使用中は、目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
 - ・ 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ・ 本品を使用して研磨する際には、局所排気装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・ 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・ 高温多湿を避け、直射日光や水のかかるおそれのない場所で保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-0100

E-Ma i l：info@come-nets.net

外国製造所：イヴ

EVE Ernst Vetter GmbH

国 名：ドイツ