

医04 整形用品
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 70914000
アルティメット スプリント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・本材又は本材に使用している成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

円板

【使用目的又は効果】

咬合スプリント等を作製するために用いる。ただし、使用期間が30日を超えないものに限る。

【使用方法等】

1. 成形器を用い、本品を軟化させる。加熱時間は使用する成形器に合わせる。
2. 加熱後、成形する。
3. カッティング等し、成形物を調整する。

【使用上の注意】

1. 本材の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせてください。
2. 本材の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けてください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本材は、湿気の少ない場所、又、密閉した状態にて保管してください。
- ・本材は、直射日光の当たる場所での保管はしないでください。
- ・本材を高温となる場所に置かないでください。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社ULTI-Medical
電話番号: 06-6753-8031