

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ

チューブセット-FP（青）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【使用上の注意】

使用目的以外に使用しないこと。

【貯蔵・保管方法】

高温、多湿を避け室温保存すること。

【包装・梱包単位】

包装単位：1セット


【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 ファーポイント
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪1475
TEL 0265-79-0557

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

A・B・C（各1）をもって1セットとする。

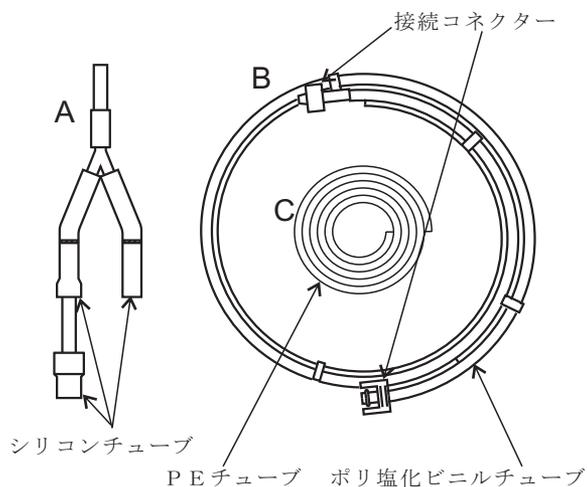

A 長さ 約 0.5m
B 長さ 約 2.0m
C 長さ 約 1.5m

2. 原理

吸引器（ハンドピース）、回収容器に接続することによって吸引する。

【使用目的、効能又は効果】

吸引器（ハンドピース）と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

【品目仕様等】

チューブはじゅうぶんな柔軟性があること。
接続コネクタは、吸引器、回収容器に確実に接続でき、柔軟性と硬さがあること。

【操作方法又は使用方法】

滅菌方法

本品は未滅菌であるため、使用前にエチレンオキサイド滅菌を施すこと。また本品包装の滅菌バッグのインジケータにより滅菌効果を確認すること。

再使用しないこと。

使用方法

吸引器（ハンドピース）と回収容器の接続口に接続する。

別紙⑨