

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

ポリポップスワブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本品はポリプロピレン製の軸の先端部にウレタンフォーム製の繊維を取り付けた綿棒です。滅菌済みの状態でパウチ包装されています。綿球や軸の形状の違いから、下記の組合せがあります。

製品コード	規格
PN003	鼻腔用ショートスワブ（80 mm） 6000 本
PN004	鼻腔用ショートスワブ（100 mm） 6000 本
PN005	口腔用ショートスワブ（125 mm） 4000 本

2. 材質・組成

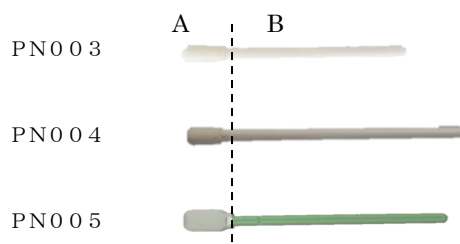

A 頭部分：ウレタンフォーム

B 軸部分：ポリプロピレン

【使用方法等】

(1) パッケージを開封して、スワブを取り出して下さい。

(2) サンプルを採取します。サンプリング中、汚染のリスクを軽減するために、スワブの端（先端）は疑わしい感染にのみ接触するものとします。

※過度な力をかけるとスティックが折れてしまう恐れがあります。

(3) 内部検査手順に従ってスワブを処理します。または、綿棒を輸送用試験管に入れます。

(4) 検査室や研究所まで出来るだけ早く搬送してください。

【使用目的又は効果】

本品は、検査のために、口腔・鼻腔から体液や分泌物などを採取する製品です。必要に応じて、切断領域を折って、輸送媒体または貯蔵容器に入れることで検体を輸送することができます。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品は訓練を受けた担当者に取り扱ってください。使用目的以外に使用しないで下さい。
2. 使用前にこの添付文書をよく読んで下さい。
3. 本品は使い捨ての滅菌製品です。使用済み製品は廃棄してください。再利用または再滅菌しないでください。
4. パッケージが破損している場合、この製品を使用しないでください。
5. 本品は再利用または再滅菌された場合、感染または不適切な結果につながる恐れがあります。
6. 有効期限が切れた後は使用しないでください。
7. 検体者からサンプルを採取する際に、過度な力をかけるとスティックが折れてしまう恐れがあります。
8. 一時的な時間でサンプルを採取するのに十分な強度はありますが、サンプリングに時間が掛かると、内容物がスワブから落ちる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法・有効期間

本品は、未開封であり、製造日から3年間は、1～30℃で保存出来ます。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エクセル・クリエイツ
住 所：〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1-16-13
堺筋バストビル
電 話 番 号：06-6121-2130

外国製造業者：WIZCHEM CO., LTD.
国 名：韓国

取扱説明書を必ずご参照ください。