

タムブライト

【形状・構造及び原理等】

補綴物等の研磨剤。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着した、歯科技工用研磨フェルトホイール、ロビンソンブラシ、パフ等に本製品を塗布し、被研磨物を研磨する。

【使用上の注意】

- 1) 適用対象: 歯科用補綴物、歯科用技工物
- 2) 併用医療機器: 歯科技工用研磨器材、歯科技工用回転器具
- 3) 本製品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 4) 本製品は、記載の使用目的以外に使用しないこと。
- 5) ブラシ、パフ等は本材専用とし、他の研磨材と併用しないこと。
- 6) 研磨材の付着したブラシ、パフ等は補綴物に分けて使用すること。
- 7) 研磨後補綴物等は水で十分洗浄すること。
- 8) 本製品使用時には、発熱に注意しながら作業を行うこと。
- 9) 本製品使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- 10) 本製品を用いて研磨作業の際には、粉塵、飛散による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 11) 本製品を使用する際には、適切な換気(1時間当たり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
- 12) 本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
- 13) 本製品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社T・U・M