

バイルミクスルーペカム

【禁忌・禁止】（使用方法）

- ・本品は、耐熱性ではないため、滅菌などで加熱しないこと。

【形状・構造及び原理等】*

- ① カメラ本体 ProHD
- ② リモコン
- ③ USB 延長ケーブル
- ④ カメラレンズ
- ⑤ 三脚
- ⑥ カメラ本体 ProHD Full
- ⑦ ProHD Full 専用端末

動作原理

本品は、レンズ部から取り込んだ口腔内の情報を、カメラ本体に内蔵されているイメージセンサにより電気信号に変換、その電気信号をカメラケーブルにてパソコン又は専用端末に転送し、モニター又は液晶画面上にその映像を映し出す。

【使用目的又は効果】

本品は口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者様への説明などに使用する装置をいう。

【使用方法等】*

- 1、医療用ヘッドランプまたはカメラ固定装置に本品を取り付ける。
- 2、附属ケーブルを使用し、カメラ本体と専用端末又はパソコンを繋ぐ。
- 3、専用端末の動画再生ソフトを起動し、端末の液晶画面またはモニターに映し出す。

【使用上の注意】

- ・使用中は本品のみならず、接続されている関連機器全般と患者の状態を監視し、異常が検知された場合は直ちに操作を中止して適切な措置を行うこと。
- ・本品は日当たりが十分な場所で使用すること。
- ・暫く使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ完全に作動することを確認すること。

【保管方法及び期間等】

- ・本品は、高温多湿及び水のかかる恐れのある場所を避けて保管すること。
- ・本品は、外圧（物理的負荷、振動、衝撃）及び落下の危険がない安定した場所に保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による点検

本品を安全に使用するため、使用前には毎回以下の項目を確認すること

- ・光学系に曇りや汚れがないこと。
- ・各部が正しく機能すること
- ・日常の掃除等以外の分解修理、改造は絶対にしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社岡部

住 所：〒815-0041 福岡県福岡市南区野間 4-4-32

電 話：092-561-8198

F A X：092-561-8070

製 造 業 者：VizVocus Inc.

ヴィズヴォーカス社（国名：アメリカ合衆国）

販売業者(代理店)連絡先：