

2023 年 7 月作成（第 1 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

SMディスク

【形状・構造及び原理等】

形状：



全長	44.6 mm
作業部径	φ19 mm
軸径	φ2.35 mm

原材料：

作業部	ステンレス鋼、ダイヤモンド粒子
軸部	ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研削に用いる器材である。

【使用方法等】

- 使用前、本品が滅菌済みか確認すること。
- 歯科用電気駆動装置に装着し、試運転して回転に振れ等がないことを確認し、被研削物を研削する。
（推奨回転数：500～1,000 rpm）

【使用上の注意】

- 素材のステンレス鋼は、鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。
- 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- 本品は、歯科医療有資格者のみが使用すること。
- 破損、ひび、傷、曲がり、腐食、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 破損の原因になり得るので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 使用前に必ず滅菌すること。
- 使用後は、直ちに清浄すること。
- 洗浄、滅菌後の器具は水分を除去し、十分に乾燥させてから保管すること。
水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。
- 研削力が低下した場合には、新しい製品と交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前および使用後は、破損、ひび、傷、曲がり、腐食等がないか確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社岡部
福岡県福岡市南区野間 4-4-32
TEL：092-561-8198 FAX：092-561-8070

製造業者：株式会社小川製作所