

添付文書

医療機器届出番号 40B1X10004000043

2026年3月作成（第1版）

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000

ILLUCOフリップアップルーペ

【形状・構造及び原理等】

形状：



原理：

ルーペにより対象物を拡大する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社岡部
福岡県福岡市南区野間 4-4-32
TEL：092-561-8198 FAX：092-561-8070

製造業者：ILLUCO Co. Ltd.
(イルコ)

外国製造所国：大韓民国

【使用目的又は効果】

本品は、外科処置時に術者が装着するレンズから成るシステムである。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。通常、双眼で用いられ、観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用方法等】

1. 双眼ルーペが取り付けられた眼鏡を装着する。
2. 接眼レンズの位置を調整する（上下および前後）。
3. 中央のノブで瞳孔間距離を調整する。
4. ルーペ越しに対象物の拡大像を観察する。

【使用上の注意】

- ・本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ・破損、ひび、傷、曲がり、腐食、汚染等のあるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前および使用後は、破損、ひび、傷、曲がり、腐食等がないか確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・滅菌は行わないこと。