

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード：34864000

ニキビパッチ Cata-MEDICA


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・感染が見られる傷には使用しないでください。
- ・軟膏、クリーム及びオイル等の殺菌・消毒剤を本品と一緒に使用しないでください。
- ・一枚で覆いきれない傷には使用せずに、傷よりも大きなサイズの製品を使用してください。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1. 本品は、吸水体として粘着性を持ったハイドロコロイドの素材のパッチです。
2. 体に接触する部分の組成はハイドロコロイドです。

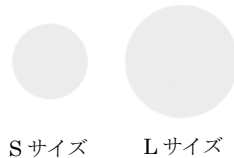

サイズ	長さφ	厚み	入数 (1 シートあたり)
S	8mm	0.3mm	24 枚/シート
L	12 mm	0.3 mm	12 枚/シート

〈原理〉

身体の一部に用いる、粘着剤を付したポリウレタンの丸形状の絆創膏材です。傷の被覆及び保護に用います。

〈原材料〉

外側：ポリウレタン 内側：ハイドロコロイド

【使用目的又は効果】

本品は、患部の被覆、及び保護をするためのパッチです。

【使用方法等】



1. 手指と患部をよく洗い、清潔にしてください。
2. 包装袋から本品を取り出し、セパレーターを剥がしてください。
3. セパレーターからニキビパッチを剥がしてください。



4. 患部より大きいニキビパッチを選択して、包み込むように貼付します。
5. 貼付した部分を触らないように就寝してください。
6. 起床後に肌を傷つけないように、ゆっくり剥がしてください。
7. 残ったニキビパッチのシートは、包装袋に戻して保管してください。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー症状が認められた場合には、使用を中止し、医師に相談するようにしてください。
2. 痛みを感じる場合は、無理に使用せず使用を中止し、使用中止後も痛みが続く場合は専門医の診察を受けてください。
3. すぐにニキビパッチを剥がすと肌を傷つける可能性があるため、5 時間以上経過した後にパッチを剥がしてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
次のようなところに保管しないでください。
 - ・暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高温を含んだ空気の影響を受けるところ。
 - ・小児の手の届かない場所に保管してください。
2. 耐用期間
標準的な使用期間：3 年 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

カーターテクノロジー株式会社
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207
TEL. 048-993-4422

〈製造業者〉

Zhejiang Hongyu Medical Commodity CO.,LTD