

器 25 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

デンタルミラー Cata-MEDICA

【禁忌・禁止】

- ・ 本品の形状変更や改造等をしないこと。
- ・ 本品に劣化や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1. 本品はミラーヘッド及びハンドル部で構成されている。
2. 本品は未滅菌品である。必要に応じて使用前に滅菌を行い、使用する。



〈原理〉

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

〈原材料〉

ミラーヘッド：ガラス、ハンドル部：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は排圧のために使用する。

【使用方法等】

1. 本品が洗浄・乾燥されて清潔であることを確認する。
2. 必要に応じて、滅菌を行う。

〈滅菌条件〉

- ・ オートクレーブ滅菌 121℃-20 分
 - ・ 滅菌バック（紙+PP）に収納し滅菌する。
3. 本品のハンドル部を手に持ち口腔内へ挿入し、歯の表面や裏側をミラーヘッドで確認する。

4. 使用後は、本品を洗浄・乾燥を行い保管する。

【使用上の注意】

1. 本品を用いた処置により発疹、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー症状が認められた患者には使用を中止し、医師に相談すること。
2. 破損等による誤飲の原因になるため、以下の事項は行わないこと。
 - （1）本品に対して曲げ、切削、加圧等
 - （2）粗雑な取り扱い（傷をつける、落下させる、強い衝撃を与える）

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - （1）次のようなところに保管しないこと。
 - ・ 水のかかるところ。
 - ・ 塩分など、暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高温を含んだ空気の影響を受けるところ。
 - ・ 子供や動物の手の届くところ
 - （2）保管環境条件：温度：1～30℃、湿度：10～95%RH（結露なきこと）
2. 耐用期間
標準的な使用期間 ：5 年〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

〈点検方法〉

使用前に本品に傷、変形、破損等の異常がないことを確認すること。

〈洗浄・乾燥〉

使用後に、温水ですすぎ、よく水を切って、自然乾燥する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

カーターテクノロジー株式会社

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207

TEL. 048-993-4422