

医03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(JMDN:70976000)

ネオフィット検査検診用ニトリルグローブ

再使用禁止

【 禁忌 ・ 禁止 】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主材料とする検査・検診用の使い捨て手袋である。

左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。
パウダーなし。未滅菌である。

掌幅(mm)

XS: ≤ 80 / S: 80 ± 10 / M: 95 ± 10 / L: 110 ± 10

全長(mm)

230 以上

【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為および汚染された医療材料を取扱う場合、患者および使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱上部のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

(1) 全般的な注意

- ・同一患者のみに使用すること。
- ・本品に穴を開けるなど加工または分解しないこと。
- ・薬品・溶剤等によっては手袋に影響を与える可能性があるため、確認の上使用すること。尚、本品を強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹、ショック等の症状が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。

(2) 使用前の注意

- ・適切なサイズ等の製品を選択し、使用すること。
- ・製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用をしないこと。

(3) 使用中の注意

- ・鋭利な器具等に触れると、破れや穴があくことがあるので注意し、破れた場合は新しい製品に交換すること。

(4) 使用後の注意

- ・本品は単回使用であり、使用后、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

- ・水ぬれに注意し、直射日光および高温、多湿な場所を避けて保管すること。包装開封後は、直射日光や強い人工光線灯等の紫外線を避け、X線機器等に近づけないこと。

(2) 使用の期限

- ・使用期限内で使用する。
製造年月より5年[自己認証による]
(使用期限は本品に記載)

【包装】

250 枚／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：



川西工業株式会社

岐阜県大垣市曾根町二丁目 195 番地

TEL: 0584-77-7997

外国製造業者：



Sri Trang Gloves (Thailand) Public
Company Limited

製造国名：

タイ

販売元：



MEDIUS

文献請求先：

メディアスホールディングス株式会社
東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号
TEL: 0120-37-1640