

## 医03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(JMDN:70976000)

## 検査検診用ニトリルグローブ ロベリア

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

・再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主材料とする検査・検診用の使い捨て手袋である。

左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。パウダーなし。未滅菌である。

掌幅(mm)

XS: 76±4/S: 86±4/M: 98±4/L: 107±4

全長(mm)

230 以上

## 【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為および汚染された医療材料を取扱う場合、患者および使用者を交差感染から守るために使用する。

## 【使用方法等】

小箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

## 【使用上の注意】

重要な基本的注意

## (1) 全般的な注意

- ・同一患者のみに使用すること。
- ・本品に穴を開けるなど加工または分解しないこと。
- ・薬品・溶剤等によっては手袋に影響を与える可能性があるため、確認の上使用すること。尚、本品を強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹、ショック等の症状が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。

## (2) 使用前の注意

- ・適切なサイズ等の製品を選択し、使用すること。
- ・製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用をしないこと。

## (3) 使用中の注意

- ・鋭利な器具等に触れると、破れや穴があくことがあるので注意し、破れた場合は新しい製品に交換すること。

## (4) 使用後の注意

- ・本品は単回使用であり、使用后、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

## (1) 保管方法

- ・水ぬれに注意し、直射日光および高温、多湿な場所を避けて保管すること。包装開封後は、直射日光や強い人工光線灯等の紫外線を避け、X線機器等に近づけないこと。

## (2) 使用の期限

- ・使用期限内で使用すること。[自己認証による]  
(使用期限は本品に記載)

## 【包装】

250 枚/箱

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

 川西工業株式会社

岐阜県大垣市曾根町二丁目 195 番地

TEL: 0584-77-7997

(文献請求、問合せ先も上記に同じ)

外国製造業者：

Hartalega NGC Sdn. Bhd.

製造国名：

マレーシア