

機械器具 32 医療用吸引器
 一般医療機器 吸引用キャニスタ (34858000)
ペルゴ サクション ライナー システム

(再使用禁止：キャニスタを除く)

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・キャニスタ以外は再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1) 概要

本品は、排液等の吸引器用キャニスタライナーシステムであり、再使用可能なキャニスタに単回使用のライナー（吸引バッグ）を取り付けて使用する。吸引バッグの蓋とライナーは接合されており、ライナーには、予め凝固剤が入っている。ライナーシステムと併用して用いる付属品には、シリアル接続チューブ、追加凝固剤がある。


2) 形状、構造

1. キャニスタ



吸引源コネクタ

2. ライナー（吸引バッグ）

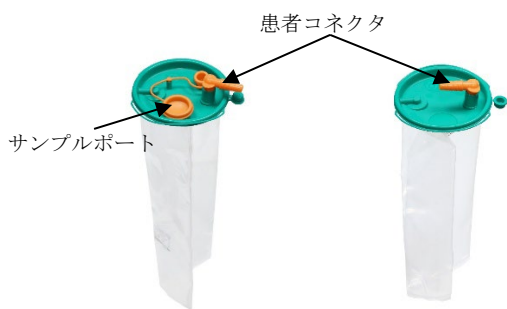

サンプルポート

患者コネクタ

(HF2000ml タイプ)

(HF3000ml タイプ)

3. シリアル接続チューブ



4. 追加凝固剤



【使用目的又は効果】

患者等から吸引された、血液や体液等を回収、貯留し、廃棄するために使用する。

【使用方法等】

- 1) キャニスタにライナー（吸引バッグ）を接続し、カートや壁のブラケットに設置する。
- 2) 吸引源を吸引源コネクタに接続する。
- 3) 患者コネクタに、吸引チューブを接続する。
- 4) シリアル接続する際は、シリアル接続チューブのサンプルポートコネクタを、一方のライナーのサンプルポートに接続し、吸引チューブコネクタをもう一方のライナーの患者コネクタに接続する。
- 5) 必要に応じて追加凝固剤をサンプルポートから投入する。

【使用上の注意】

1 重要な基本的注意

- 1.1 キャニスタ以外の使用は、1人の患者に一回限りとし、他の患者への再使用はしないこと[交差感染を引き起こすおそれがある]。
- 1.2 本品を滅菌・消毒しないこと[変形によるリークにより安全性が損なわれる]。
- 1.3 本品に変形又は破損がある場合は使用しないこと。
- 1.4 接続するチューブが折れ曲がらないようにすること[チューブが折れ曲がると流量抵抗が大きくなる]。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【有効期限】

包装ラベル参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

（製造販売業者）

カッティングエッジ・メディカル合同会社

Tel. 03-5798-3697

（製造業者）

Pergo Medikal ve Ilac Sanayi A.S.（トルコ）