


オブチクリン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

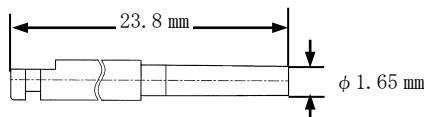

軸：ISO 1797 タイプ 1

*原材料

軸部：ポリフタルアミド（PPA）

作業部：シリコン、酸化アルミニウム

【使用目的又は効果】

歯牙から仮着用セメントを除去するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出し、滅菌バッグに入れて、高圧蒸気滅菌を実施する。推奨される滅菌条件は以下のとおり。

方式	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
プレバキューム式	134℃	3分	14分
プレバキューム式 (滅菌バッグ使用)	135℃	3分	16分
重力置換式 (滅菌バッグ使用)	121℃	30分	15～30分

2. 歯科用ハンドピース又は歯科技工用エンジンに装着する。
3. オブチクリンを回転させ、仮着用クラウンを取り外した歯牙に付着した仮着用セメントを研削し、除去する。
使用回転数：3,000～5,000回転/分（注水）

【使用方法に関する使用上の注意】

- 1) 使用回転数を超えた使用の場合には、破損してけがをすることがあるので、使用回転数を厳守すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- 4) 発熱により歯牙に損傷を与える恐れがあるため、冷却水を供給しながら使用すること。
- 5) 軟組織の損傷を避けるため、口腔内軟組織に接触させないこと。
- 6) 滅菌中は、高圧蒸気滅菌器の金属部分に接触しないように注意すること。
- 7) 器具の材質に影響を与える恐れがあるため、135℃を超える高温で工程（滅菌、乾燥）を行わないこと。
- 8) 高圧蒸気滅菌後は、滅菌バッグに破れが無いことを確認し、破れていた場合には再滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品を用いた処置により発疹などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品は未滅菌品であるので、使用前に蒸留水を使用して高圧蒸気滅菌を行う。それ以外の滅菌方法については検証されていないので、高圧蒸気滅菌を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・直射日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

[有効期間]

- ・60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンビスタジャパン株式会社

製造業者：カー社（Kerr Corporation）

国名：アメリカ(U.S.A)