

歯科材料（9） 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000  
**クリーニングブラシ**


**再使用禁止****【禁忌・禁止】**

- ・ ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

本品は、歯科用ハンドピースに装着し、回転させて歯面を研磨、清掃する。

使用回転数：5,000回転／分以下

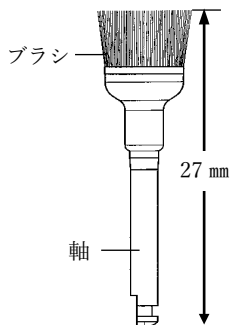

軸：タイプ1（ISO 1797）  $\phi 2.35\text{mm}$

**材質**

ブラシ：ポリアミド(PA)

軸：真鍮（ニッケルメッキ）

**【使用目的又は効果】**

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いる。

**【使用方法等】**

1. 歯科用ハンドピースに装着する。
2. 歯面のプラークの染め出しを行う。
3. 研磨材を併用し、歯面を清掃、研磨する。通常は2,000回転／分以下（目視で回転が確認できる速度）で使用する。
4. 研磨材を洗い流すため、水洗を十分に行う。

**【使用方法に関する使用上の注意】**

- 1) 清掃、研磨は使用回転数以下で行うこと。
- 2) 使用回転数を超えた使用の場合には、破損してけがをすることがあるので、使用回転数を守ること。
- 3) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 4) 予め患者の口腔外で回転させて、振れないことを確認すること。
- 5) 本品が変形あるいは破損し、口腔内を傷つけるおそれがあるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。

**【使用上の注意】****[重要な基本的注意]**

- ・ 安全のために、保護めがねなどを使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】****[保管方法]**

- ・ 直射日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

**[有効期間]**

- ・ 60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]  
使用期限は、包装に記載。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名：エンピスタジャパン株式会社

製造業者：カー社（Kerr Corporation）

国名：アメリカ(U.S.A)