

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000
クリニーク チューブ

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本製品はペーストで、色、香料の違いにより 5 種類ある。

種類	ペパーミント		ライト	グリーンアップル	ベリー
	フッ素入り	フッ素無し	フッ素入り	フッ素入り	フッ素入り
ペースト色	青		白	緑	紫

原材料：

ペパーミント	パーライト、グリセリン、水、ソルビトール、メチルパラベン、エタノール、プロピルパラベン注 1)、色素、香料（メントールを含む）、フッ化ナトリウム注 2)、二酸化ケイ素注 2)、その他 注 1) フッ素入りには含まない。 注 2) フッ素無しには含まない
ライト	パーライト、グリセリン、水、ソルビトール、メチルパラベン、エタノール、プロピルパラベン、二酸化チタン、フッ化ナトリウム、二酸化ケイ素、その他
グリーンアップル/ベリー	パーライト、グリセリン、水、ソルビトール、メチルパラベン、エタノール、色素、香料（メントールを含まない）、フッ化ナトリウム、二酸化ケイ素、その他

【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面を研磨する。

【使用方法等】

1. ペーストをチューブから押し出して少量取り出す。
2. 歯科予防治療用ブラシ、又は歯磨カップ等に適量を付着させ、1 回分のペーストで 2～3 歯を目安に清掃、研磨する。
回転数：3,000 回転/分以下

RDA(Relative Dentin Abrasion 相対的象牙質研磨効率)：21

- 【使用方法に関連する使用上の注意】
- 熱の発生やペーストの飛散を避けるために、低速度（3,000 回転/分以下）で使用する。
 - 歯面に被膜が残った場合は、新たにペーストを取り、処置すること。
 - 象牙質が露出している場合は、はじめにエナメル質を、次に象牙質を処置すること。
 - 分取したペーストは、容器に戻さないこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は、高温多湿を避けて室温で保管し直射日光、デンタルライト等の強い光があたる場所に置かないこと。
- ・開封後はしっかりと蓋を閉め、できるだけ速やかに使い切る。

〔有効期間〕

- ・使用期限は、包装に記載〔自己認証（製造元データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンビスタジャパン株式会社
製造業者：カー社（Kerr Corporation）
国名：アメリカ(U.S.A)