

歯科材料（9） 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
インプラント ペースト

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

チューブに入ったピンク色のペーストで、研磨材を含有し、歯科用インプラントの清掃及び研磨に用いる。

RDA(Relative Dentin Abrasion 相対的象牙質研磨効率)：9.8¹⁾

REA(Relative Enamel Abrasion 相対的珐瑯質研磨効率)：4.5¹⁾

¹⁾ 製造元による測定値

原材料：アルミナ、D-ソルビトール、グリセリン、
メチルパラベン、香料、色素、その他

【使用目的又は効果】

歯科用インプラント（フィクスチャ及びアバットメント）の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. インプラント用のインスツルメントを使用して、インプラントの付着物を除去する。



2. ペーストを歯科用研磨カップあるいはブラシを使用して、インプラントのネックを 2000 回転/分以下で、20 秒間清掃、研磨する。

**【使用方法に関連する使用上の注意】**

- 1) 2000 回転/分以下の使用回転数で使用する。
- 2) 併用する歯科用研磨器材の使用方法を確認すること。

【使用上の注意】**【重要な基本的注意】**

- ① 本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

- ・ 本材は、高温多湿を避けて室温で保管し直射日光、デンタルライト等の強い光があたる場所に置かないこと。

【有効期間】

- ・ 36 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンピスタジャパン株式会社
製造業者：カー社 (Kerr Corporation)
国名：アメリカ (U.S.A)

販売元：株式会社 **ヨシダ**
連絡先：03-3845-2931（器材営業本部）