

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000
DCプロフィーペースト グラッシ

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【有効期間】

使用期限は包装に記載 [自己認証（製造元データ）による]

【形状・構造及び原理等】

チューブ型の容器に入った緑色のペーストである。研磨材としてパーライトを含有し、歯面を清掃及び研磨する。

RDA(Relative Dentin Abrasion 相対的象牙質研磨効率) : 21
原材料 : パーライト、グリセリン、水、ソルビトール、ポリキシエレン、色素、エタノール、香料、フッ化ナトリウム、その他

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : エンピスタジャパン株式会社
製造業者 : カー社 (Kerr Corporation)
国名 : アメリカ(U.S.A)

販売元 :  株式会社 **ヨネクラ**
連絡先 : 03-3845-2931 (器材営業本部)

【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面を研磨する。

【使用方法等】

ペーストを歯科治療用ブラシ、歯磨カップ等に付け、3,000 回転/分以下の速度で歯面を清掃、研磨する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ブラシあるいはカップに付着した1 回分のペーストで2～3 歯を清掃、研磨すること。
- 2) 熱の発生やペーストの飛散を避けるために、低速度（3,000 回転/分以下）で使用する。
- 3) 歯面に被膜が残った場合は、新たにペーストを取り、処置すること。
- 4) 象牙質が露出している場合は、はじめにエナメル質を、次にデンチン質を処置すること。

【使用上の注意】**【重要な基本的注意】**

本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

- ・ 本材は、高温多湿を避けて室温で保管し、直射日光やデンタルライト等の強い光が当たる場所に置かないこと。