

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

ミキシングチップ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本製品は、エクストルーダー（別届出品）に装着した歯科材料のカートリッジ容器に装着し使用するカートリッジ用と、自動練和器（歯科用印象材混ごう器）に装着したボリュウム容器に装着して使用する、ボリュウム用の2種類から構成される。容器内の2種類の材料（ペースおよびキャタリスト）がミキシングチップ内に押し出され、内部のスクリューを同時に通過することにより、材料が練和される。カートリッジ用には必要に応じて、先端にディスポーザブル シリンジチップあるいはシリコンバイトチップを装着する。また、ボリュウム用は、ボリュウム容器とミキシングチップを固定するためにミキシングチップカラーを使用する。

1. ミキシングチップ カートリッジ用

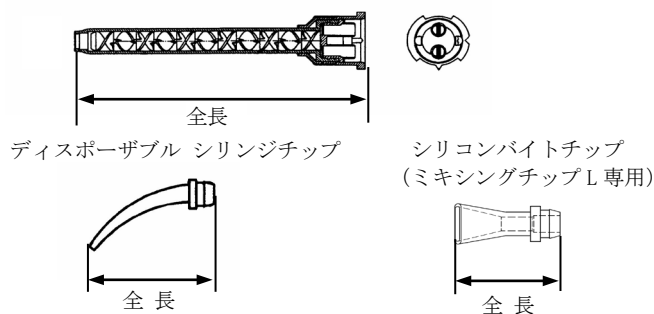

2. ミキシングチップ ボリュウム用

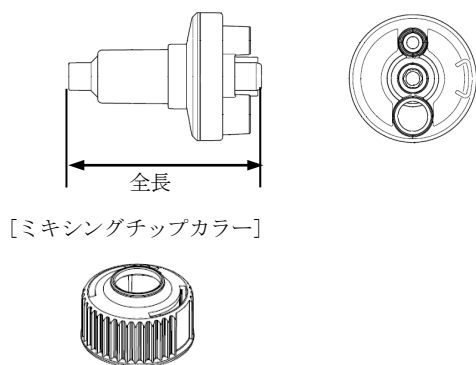

	種類	全長	先端内径
ミキシングチップ カートリッジ用	L	88.5mm	φ 4.9mm
	S	69.5mm	φ 3.65mm
ミキシングチップ ボリュウム用	-	55.8mm	φ 6mm
ディスポーザブル シリンジチップ	L	26.8mm	φ 0.6mm
	S	22.8mm	φ 0.6mm
シリコンバイトチップ	-	18.5mm	-

原材料：

- ・ミキシングチップ ハウジング、リング：ポリプロピレン
スクリュー：ポリオキシメチレン
- ・ディスポーザブルシリンジチップ：高密度ポリエチレン
- ・シリコンバイトチップ：高密度ポリエチレン
- ・ミキシングチップカラー：ポリオキシメチレン

【使用目的又は効果】


歯科材料を練和、注入するのに用いる。

使用できる材料

販売名	一般的名称	認証番号等
エクストルド [®]	歯科用シリコン印象材	224ADBZX00262000
テイク 1 アドバンス	歯科用シリコン印象材	224ADBZX00263000
ソフトティッシュ ムーラーズ	歯科用樹脂系模型材	13B1X10405105800
テイク 1 アドバンス バイト	歯科咬合採得用材料	13B1X10405107100

【使用方法等】

[カートリッジ用]

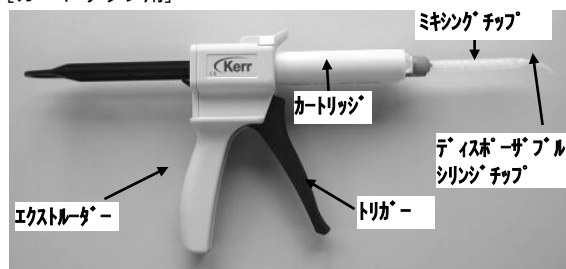


- 1) 使用する材料のカートリッジをエクストルーダーに取り付け、カートリッジキャップを反時計方向(左)に 90 度回転し外す。
- 2) 新しいミキシングチップを取り付ける前に、エクストルーダーのトリガーを静かに引いて、カートリッジ内のペーストを少量押し出し、ペースとキャタリストと一緒に押し出されることを確認し、カートリッジの注出口をふき取る。
- 3) ミキシングチップのノッチをカートリッジの切りこみに合わせ取り付け、時計方向(右)に 90 度回転しロックする。
- 4) 必要な場合は、ディスポーザブル シリンジチップあるいはシリコンバイトチップをミキシングチップの先端にカチッと音がするまで押し込む。
- 5) エクストルーダーのトリガーを静かに引くことにより、材料を練和、注出する。トリガーを離すと注出が止まる。

[ボリュウム用]

- 1) ボリュウム容器のノズルを上に向けた状態で、容器を平らな面に置く。
- 2) 容器を片手で固定しながら、片方の手でタブをノズルと 90° の角度になるまで持ち上げる。
- 3) タブをノズルから外し、容器を自動練和器（歯科用印象材混ごう器）に取り付ける。
- 4) ミキシングチップを装着する前にペーストを注出し、ペースとキャタリストと一緒に押出されることを確認し、容器の注出口をふき取る。

- 5) 容器のペースト排出口にミキシングチップを取り付ける。
ミキシングチップの六角部分が自動練和器のミキシングロッドに確実に装着されていることを確認する。

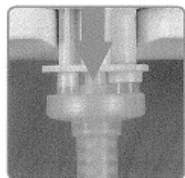

- 6) ミキシングチップカラーをミキシングチップに装着し、確実に固定されるまで時計回りに回す。
7) 使用する自動練和器の使用説明書に従い、材料を練和、注出する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 使用後、カートリッジはミキシングチップをつけたままにするか、カートリッジキャップを取り付けて密閉すること。
- 2) ペーストを注出する時に、抵抗が感じられる場合は、過度の圧力をかけずに、ミキシングチップの交換等を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンビスタジャパン株式会社
製造業者：カー社(Kerr Corporation)
国名：アメリカ (U.S.A.)