

歯科材料 (8) 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000
(歯科用練成器具 70682000)

ソフトティッシュ ムーラージュ

再使用禁止 (ミキシングチップ、ディスポーザブルシリンジチップ)


【禁忌・禁止】

再使用禁止 (ミキシングチップ及びディスポーザブルシリンジチップ)

【形状・構造及び原理等】

本品はペーストタイプの材料で、中仕切りのあるカートリッジの両側にそれぞれ充填されているベースとキャタリストの 2 種類のペーストを練和して、咬合採得に使用する。

カートリッジ形状

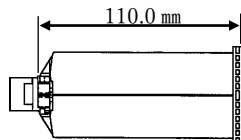

内容量：1 カートリッジ 50ml

構成品

- ・分離材 内容量 15ml
- ・エクストルーダー(製造販売届出番号：13B1X10405105300)
- ・ミキシングチップ (製造販売届出番号：13B1X10405105200)

原材料

メチルビニルシロキサン、二酸化けい素、色素、その他

分離剤：ポリエチレングリコール、イソプロピルアルコール、色素、その他

【使用目的又は効果】


歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる。

【使用方法等】

1. 使用準備

1) カートリッジのエクストルーダーへの装着

- ① エクストルーダー本体の背面にあるリリースレバーを押上げ、プランジャーを止まるまで後方に引く。

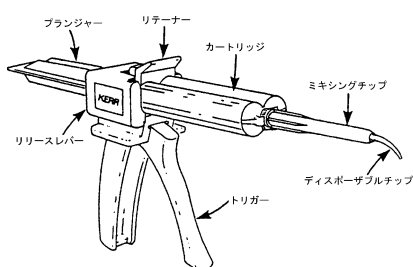

- ② エクストルーダー上部前面のリテーナーを上げ、カートリッジの縁に切りこみが入っている方を下にして、エクストルーダーの突起に合うように装着し、リテーナーを戻す。

2) ミキシングチップとディスポーザブルシリンジチップの取付け

- ① カートリッジキャップを反時計方向 (左) に 90 度回転させ、外す。
- ② 新しいミキシングチップを取り付ける前に、トリガーを静かに引いて、ペーストを少量押し出し、ベースとキャタリストと一緒に押出されることを確認する。カートリッジの注出口をふき取る。
- ③ ミキシングチップのノッチをカートリッジの切りこみに合わせ取り付け、時計方向 (右) に 90 度回転させて固定する。
- ④ ディスポーザブルチップの先端を 2~3mm 切り落とし、ミキシングチップの先に取り付ける。

2. インプラント用模型作成手順

- ① 印象を水洗、乾燥する。
- ② インプラント周辺の印象面に分離材をまんべんなく塗布する。
- ③ 印象内のトランスファーコーピングにアナログ(技工用ダウエルピン)を装着する。
- ④ アナログ周辺及び必要な部位にソフトティッシュ ムーラージュを 3~10 mm の厚みに注入する。(硬化時間：4 分 30 秒) アナログは、石膏模型に固定させるため、完全に覆わない。
- ⑤ 不要部分のソフトティッシュ ムーラージュがあれば、鋭利なデザインナイフなどを用いてトリミングする。
- ⑥ 石膏を印象に注入し、メーカーの使用方法に従い、硬化を待つ。
- ⑦ 石膏硬化後、印象から模型を取り出す。

3. クラウン・ブリッジ用模型作製手順

- ① クラウン・ブリッジ作製用石膏模型を用意する。
- ② パテを用いてコアを作製し、コア硬化後に注入口とベントの穴を開ける。
- ③ ソフトティッシュ ムーラージュで置き換えたい部分の石膏をカーバイトバーなどで削り取る。
- ④ コアの内面に分離材をまんべんなく塗布する。
- ⑤ コアを石膏模型に装着する。
- ⑥ ベントから余剰ペーストが出てくるまで、ソフトティッシュ ムーラージュをコアの注入口から注入する。(硬化時間：4 分 30 秒)
- ⑦ 硬化後コアを取り除く。

4. 使用後

- ① ミキシングチップを取り外し、カートリッジキャップを装着する。
- ② カートリッジを交換する場合は、リリースレバーを押し上げ、ブランジャーを後方いっばいに引いて空のカートリッジを外す。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・ 印象は血液、唾液などを十分洗浄後、必要に応じ消毒又は滅菌をすること。
- ・ ミキシングチップをカートリッジに装着後、すべての準備が整うまでペーストを注出しないこと。
- ・ ソフトティッシュ ムーラージュが印象に残った場合は、慎重に剥がし取り、石膏模型に装着すること。
- ・ カートリッジに新しいミキシングチップを装着する場合は、装着前に必ず試し出しを行うこと。
- ・ 2回目以降の使用で万一ペーストが出ない場合は、エキスプローラー等で硬化した部分を取り除いてから使用すること。
- ・ 分離材が固まった場合は、容器をしばらくお湯（35～45℃）に浸けるか、25℃以上の温かい場所にしばらく置く。
- ・ 分離材をお湯に浸ける際には、容器にお湯が入らないように注意すること。
- ・ 分離材を溶解するのにヒーター、オーブンは使用しないこと。
- ・ 分離材は、使用前によく振ること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・ 本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄し、眼科の診療を受けさせること。
- ・ 本材は硬化後、インスツルメントや手指から簡単に剥がせるが、硬化前に衣類などに触れないように注意すること。
- ・ エクストルーダーは市販の洗剤で洗浄できるが、有機溶剤はプラスチックディスペンサーやブランジャーを溶解するおそれがあるので、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温多湿を避けて保管すること。

分離材は 20～25℃の場所で保管すること。

【有効期間】

- ・ 18 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : エンビスタジャパン株式会社

製造業者 : カー社(Kerr Corporation)

国名 : アメリカ (U.S.A.)