


歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

デュロポール

【形状・構造及び原理等】

本品は、作業部の直径、長さ等の違いにより 2 種類の形状がある。

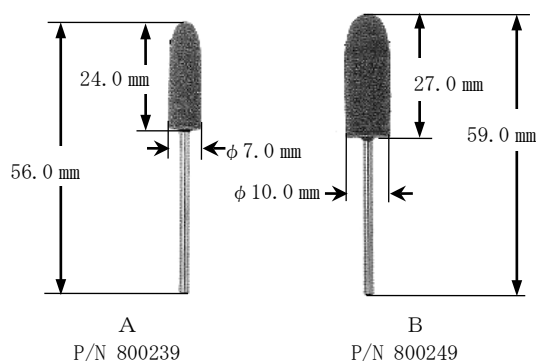

軸： ISO 1797 タイプ2 軸部直径 ϕ 2.35mm

原材料

作業部：シリコンカーバイド（ゴム結合）

軸 部：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工物を研削、研磨するために用いる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研削、研磨する。

使用回転数：5,000～10,000回転／分

適用材料：金属、アクリルレジン、軟性リベース材

[使用方法に関する使用上の注意]

- 10,000回転／分を超えた使用の場合には、破損してけがをするおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チェックでないことを確認すること。
- 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- チェック不良及びボールベアリングの磨耗は、軸ぶれを起こし、バーの破損等の原因となることがあるので、注意すること。
- 使用時はグローブ、マスク、保護メガネを着用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

[耐用年数]

- 交換時期は使用条件および保守・保存条件により異なる。日常点検を実施して摩耗、劣化、変形、その他異常が発見された場合は使用せずに廃棄し、新しいものを使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンピスタジャパン株式会社

製造業者：DFS 社 (DFS-DIAMON GmbH)

国名：ドイツ (GERMANY)