

機械器具 (66) 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

セメント用ミキシングチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本製品は、歯科材料のシリンジ容器に装着して、使用する。シリンジ容器内の 2 種類の材料（ペースおよびキャタリスト）がミキシングチップ内に押し出され、内部のミキシングエレメントを同時に通過することにより、材料が練和される。レギュラーチップとワイドチップの 2 種類の形状があり、ワイドチップは必要に応じて、先端にイントラオーラルチップあるいはルートキャナルチップを装着する。

併用する歯科材料は下表のとおり

販売名	一般的名称	認証番号
マックスセム エリート	歯科接着用レジネセメント	224ADBZX00283000
マックスセム エリート クロマ	歯科接着用レジネセメント	228ADBZX00053000
エヌ・エックス・スリー	歯科用コンボ ジェットレジネセメント	224ADBZX00285000
ネクス RMGI セメント	歯科合着用ガラスイオンレジンセメント	226ADBZX00016000
テンプレント	歯科用酸化亜鉛エポキシノールセメント	224ADBZX00265000
テンプレント NE	歯科用酸化亜鉛非エポキシノールセメント	224ADBZX00266000
ネクスユニバーサル	歯科用コンボ ジェットレジネセメント	302ADBZX00089000

1. レギュラーチップ




2. ワイドチップ




タイプ	使用する歯科材料
A	マックスセム エリート、マックスセム エリート クロマ
B	エヌ・エックス・スリー
C	ネクス RMGI セメント、テンプレント、テンプレント NE
D	ネクスユニバーサル

3. イントラオーラルチップ

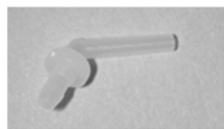

4. ルートキャナルチップ

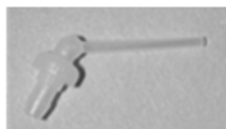

原材料 :

- ・ミキシングチップ : ハウジング、リング : ポリプロピレン
ミキシングエレメント : ポリオキシメチレン
- ・イントラオーラルチップ : ポリエチレン
- ・ルートキャナルチップ : ポリエチレン

【使用目的又は効果】

歯科材料を練和、注入するのに用いる。

【使用方法等】

1. 新しいミキシングチップを取り付ける前に、シリンジ容器のプランジャーを押して、ペースとキャタリストが一緒に押し出されることを確認し、シリンジの開口部をふき取る。
2. ミキシングチップのノッチをシリンジ容器の切りこみに合わせ取り付け、時計方向（右）に 90 度回転しロックする。
3. 必要に応じて、イントラオーラルチップあるいはルートキャナルチップをワイドチップの先端にカチッと音がするまで押し込む。
4. プランジャーを押して、均質な色調のペーストがチップから出るまでに押し出されたペーストは廃棄する。
5. 使用後は直ちにシリンジからミキシングチップを取り外し、確実にシリンジキャップを装着する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・ペーストを押し出す時に、抵抗が感じられる場合は、過度の圧力をかけずに、ミキシングチップの交換等を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温多湿を避けて保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : エンビスタジャパン株式会社
製造業者 : カー社 (Kerr Corporation)
国名 : アメリカ (U. S. A.)