

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000
ノーベルバイオケア技工用器具

H49 O

【禁忌・禁止】
(使用方法)
・他社製品と組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

(1)インプラントレプリカ

①ブローネマルクシステム



種類	製品番号	
	1個入	5個入
NP	31158	—
RP	31159	29108
WP	31160	—

②リプレイスセレクト用



種類	製品番号	
	1個入	20個入
NP	29498	—
RP	29500	29501
WP	29502	29503
6.0	29995	—

(2)アバットメントレプリカ

③スナッピーアバットメント4.0用/5.5用



種類	製品番号	
	4.0	5.5
NP	35982	35854
RP	35983	35855
WP	35984	35856
Rpl 6.0/Bmk WP/ CC WP	37842	37847

④ボールアバットメント用



製品番号
29114

⑤マルチユニットアバットメント用



種類	製品番号	
	1個入	5個入
Bmk WP	31162	—
MUA Plus	38918	38919

	種類		製品番号
⑥	アバットメントレプリカ スタンダード用	NP/RP	DCB 175-0
⑦	アバットメントレプリカ エスティコーン用	NP/RP	DCB 176-0
⑧	アバットメントレプリカ エスティコーン 単独歯用	RP	DCA 226-0

(3)インプラントレベル技工用スクリュー

⑨インプラント技工用スクリュー ブローネマルクシステム



種類	製品番号	
	1個入	5個入
CC NP	37894	—
CC RP/WP	—	37895
WP	31169	—

⑩インプラント技工用スクリュー リプレイスセレクト



種類	製品番号	
	1個入	5個入
NP	31170	—
RP/WP/6.0兼用	—	29293

(4)アバットメントレベル技工用スクリュー

⑪マルチユニットアバットメント技工用スクリュー
ブローネマルクシステム



種類	製品番号	
	1個入	5個入
共用	—	29287
Bmk WP	31163	—

⑫マルチユニットアバットメント角度付技工用スクリュー
ブローネマルクシステム



種類	製品番号
CC NP, Hex NP	37896
CC RP/WP, Hex RP	37897

(1個入包装のみ)

⑬マルチユニットアバットメント角度付技工用スクリュー
リプレイスセレクト



種類	製品番号
NP	31166
RP	31167

(1個入包装のみ)

⑭マルチユニットアバットメント技工用スクリュー
オムニグリップミニ



種類	製品番号
NP/RP	301201
WP	301202

(5)技工用プロテクションアナログ

⑮技工用プロテクションアナログ ブローネマルクシステム



種類	製品番号
NP	29116
RP	29117
WP	29118

(5個入包装のみ)

取扱説明書を必ずご参照ください。

⑩技工用プロテクションアナログ リプレイスセレクト



種類	製品番号
NP	29119
RP	29120
WP	29121
6.0	30043

(5個入包装のみ)

⑪マルチユニットアバットメント技工用 プロテクションアナログ



種類	製品番号
共用	29123
Bmk WP	29124

(5個入包装のみ)

⑫プロテクションアナログ用ハンドル



製品番号
29122

(1個入包装のみ)

(6)アピカルドリルガイド

⑬アピカルドリルガイド MUA Plus用



製品番号
38917

(7)アピカルドリル

⑭アピカルドリル



製品番号
38853

(8)バーンアウトコーピング

⑮バーンアウトコーピング ユニバーサルベース用



種類	製品番号
NP/RP	38221
WP	38222

[原材料]

構成品番号	原材料
①④⑤⑥⑦⑧⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲	ステンレススチール
②③⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	チタン合金
⑳	ポリオキシメチレン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 埋入したインプラントに印象用コーピングを接続し、印象材を用いて印象採得する。




2. 埋入したインプラントおよび使用するアバットメントに合わせ、下表のように適切なインプラントレプリカもしくはアバットメントレプリカを選択する。

埋入したインプラント	使用するインプラントレプリカ
ブローネマルクシステム	インプラントレプリカ ブローネマルクシステム
リプレイスセレクト	インプラントレプリカ リプレイスセレクト、インプラント
使用するアバットメント	使用するアバットメントレプリカ
スナッピーアバットメント	スナッピーアバットメントレプリカ
ボールアバットメント	ボールアバットメントレプリカ
マルチユニットアバットメント	マルチユニットアバットメントレプリカ
スタンダードアバットメント	アバットメントレプリカ スタンダード用
エスティコーンアバットメント	アバットメントレプリカ エスティコーン用 アバットメントレプリカ エスティコーン 単歯用

3. 印象用コーピングと、選択したインプラントレプリカもしくはアバットメントレプリカを連結し、硬化した印象材に挿入した後、石膏を注入し主模型を製作する。


(1)インプラントレベルの場合

使用するアバットメントを、主模型上のインプラントレプリカに、適切なインプラントレベル技工用スクリューで固定する。

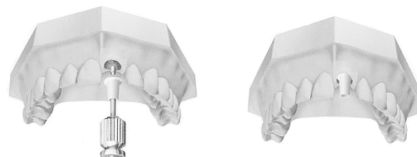

(2)アバットメントレベルの場合


主模型上の各アバットメントレプリカに対応する上部構造体を取り付け、補綴装置の製作を行う。

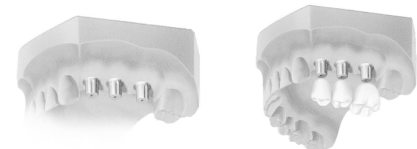

4. 補綴装置の製作及び調整


a. マルチユニットアバットメントの調整

必要に応じて、マルチユニットアバットメント技工用プロテクションアナログを、鋳物のついたゴールドシリンドー等の該当する上部構造体にアバットメントレベル技工用スクリューを用いて連結し、調整を行う。

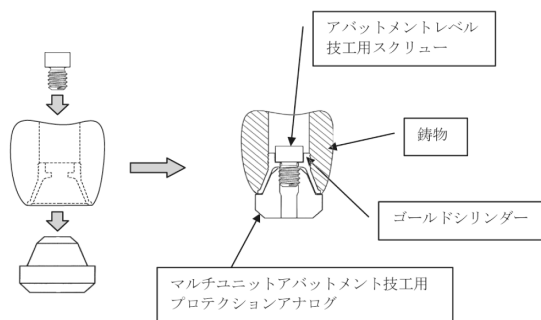

b. マルチユニットアバットメント以外のアバットメントの調整

必要に応じて、使用するアバットメントと技工用プロテクションアナログを、インプラントレベル技工用スクリューで連結して行う。調整を容易に行うために、連結したアバットメントと技工用プロテクションアナログに、プロテクションアナログ用ハンドルを接続し調整時の保持部とすることができる。

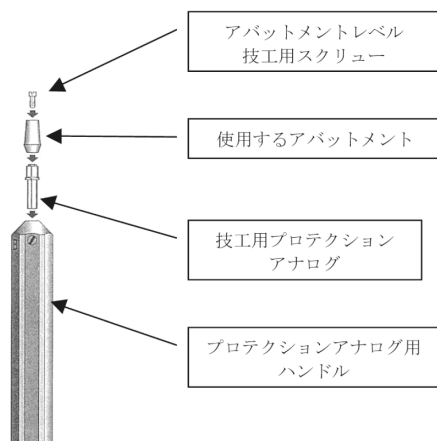

c. テンポラリーシリンドー マルチユニット用 チタン (MUA Plus) (以下、テンポラリーシリンドーMUA Plus) または テンポラリー スナップアバットメントを用いて暫間補綴装置を製作する場合

口腔外で即時重合レジンを用いてテンポラリーシリンドーMUA Plusまたはテンポラリー スナップアバットメント上に暫間補綴装置を製作する。試適後、そのテンポラリーシリンドー MUA Plusにアピカルドリルガイド、テンポラリースナップアバットメントにプロテクションアナログ/ドリルガイド CCを組み合わせからアピカルドリルをその反対側から挿入し、ドリリングして暫間補綴装置にアクセスホールを製作する。

d. ユニバーサルベース アバットメントを用いて補綴装置を製作する場合

模型上のユニバーサルベース アバットメントに装着したバーンアウトコーピングの高さを調整し (ただしユニバーサルベース アバットメント本体全てを覆うこと)、ワックスアップの支台としてこれに築盛を行って、通法により補綴装置を製作して、アバットメントにセメント合着する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・過剰な外圧をかけないこと。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止 (専用品以外併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラントおよび関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンピスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118

