

印象用コーピング

再使用禁止（プラスチック製品のみ）

H59 P

【禁忌・禁止】

（使用方法）

- ・他社製品と組み合わせて使用しないこと。〔相互作用の項参照〕
- ・再使用禁止（プラスチック製品のみ）

【形状・構造及び原理等】

本品は、以下の製品で構成される。

1. 印象用コーピング オープントレー用

①ブローネマルクシステム



種類		製品番号
NP		29070
NP	Φ 3. 5mm	33458
	Φ 4. 5mm	33459
RP	Φ 4mm	33460
	Φ 5mm	29072 33396 (ザイゴマ用)
WP	Φ 5mm	33461
	Φ 6mm	29074

②リブレイスセレクト



種類		製品番号
NP	Φ 3. 5mm	29485
	Φ 4. 5mm	33466
	Φ 5mm	29487
RP	Φ 4. 3mm	33539
	Φ 5. 3mm	33467
WP	Φ 5mm	33468
	Φ 6mm	29493
6. 0	Φ 6mm	30039
	Φ 7mm	33469

2. 印象用コーピング クローズドトレー用

①ブローネマルクシステム



種類		製品番号
NP		29071
NP	Φ 3. 5mm	33462
	Φ 4. 5mm	33463
RP	Φ 4mm	33464
	Φ 5mm	29073
WP	Φ 5mm	33465
	Φ 6mm	29075

②リブレイスセレクト



種類		製品番号
NP	Φ 3. 5mm	33537
	Φ 4. 5mm	33470
	Φ 5mm	29488
RP	Φ 4. 3mm	33540
	Φ 4. 5mm	29490
	Φ 5. 3mm	33471
	Φ 6mm	29492
WP	Φ 5mm	33472
	Φ 6mm	29494
6. 0	Φ 6mm	30040
	Φ 7mm	33473

③PS



種類		製品番号
RP-NP	Φ 3. 5mm	34547
WP-RP	Φ 4. 1mm	34548

取扱説明書を必ずご参照ください。

3. 印象用コーピング クローズドトレー用 ローププロファイル
ノーベルリプレイス



種類		製品番号
NP	Φ3.5mm	33538
	Φ4.5mm	33474
RP	Φ4.3mm	33541
	Φ5.3mm	33475
WP	Φ5mm	33476
	Φ6mm	32178
6.0	Φ6mm	32179
	Φ7mm	33477

4. 印象用コーピング クローズドトレー用 プラスチック
ノーベルリプレイス：再使用禁止（滅菌品）



種類		製品番号
NP	Φ3.5mm	35390
	Φ4.5mm	35395
RP	Φ4.3mm	35406
	Φ5.3mm	35396
WP	Φ5mm	35397
	Φ6mm	35391
6.0	Φ6mm	35394
	Φ7mm	35399

5. 印象用コーピング・バー
①ブローネマルクシステム



種類	製品番号
RP	29076

②リプレイスセレクト



種類	製品番号
NP	29087
RP	29088

6. 印象用コーピング マルチユニット オープントレー用




種類	製品番号
NR/RP/Rp1 WP	29089
Bmk WP	29091
ジグスタビライザー	33409～33412の付属品

7. 印象用コーピング マルチユニット クローズドトレー用



種類	製品番号
NP/RP/WP	29090
Bmk WP	29092
MUA Plus	38924


8. 印象用コーピング・バー マルチユニット クローズドトレー用

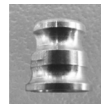

種類	製品番号
NP/RP	29093
WP	
MUA Plus	38925

9. ガイドピン

①ブローネマルクシステム

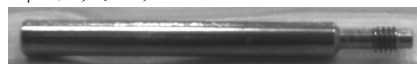


種類		製品番号
CC NP, Hex NP	20mm	37898
	20mm	37899
CC RP/WP, Hex RP	30mm	37900
	20mm	31150

②リプレイスセレクト



種類		製品番号
NP	20mm	31151
	20mm	31152
RP/WP	30mm	31153

③マルチユニットアバットメント

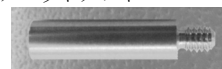

種類		製品番号	
		1個入	5個入
10mm		31154	29102
20mm		31155	29103
Bmk WP	10mm	31156	—
	20mm	31157	—

④フラットヘッド



種類	製品番号
10mm	DCA 094-0
15mm	DCA 095-0
20mm	DCA 096-0

10. 印象用コーピング スナッピーアバットメント:再使用禁止



種類	製品番号	
	4.0	5.5
NP	35995	35868
RP	35996	35869
Rp1 WP	35997	35870
Rp1 6.0/Bmk WP/CC WP	37841	37846

*〔原材料〕

構成部品番号	原材料
1-①, 2-①, 5, 9-②NP	純チタン
1-②, 2-②, ③, 3,	チタン合金
4, 10	ポリアミド樹脂
1-①, 6, 7, 8, 9-①, ②RP/WP, ③, ④	ステンレススチール

【使用目的又は効果】


本品は、歯科用インプラントの上部構造を作成するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

I. インプラントレベル


① オープントレー法

- インプラントに印象用コーピング オープントレー用を装着し、ドライバー・ユニグリップを用いてガイドピンを締め付ける。
- 印象用トレーを完全に挿入したときに、ガイドピンが突き出るように印象トレーを開窓する。開口部が大きい場合は、シートにガイドピンの穴を開けたワックスで閉じることができる。
- 各印象用コーピングの周囲およびトレー内に印象材を注入し、全ガイドピンの頭部を識別できるように印象用トレーを完全に挿入する。印象が硬化した後、各ガイドピンのねじを緩める。完全に緩んだのを確認するためにプライヤーを用いて各ガイドピンを引き上げる。印象用トレーを取り外し、インプラントにヒーリング・アバットメントを再度連結する。
- 印象用コーピングに適切なインプラントレプリカを取り付け、主模型を作製する。このとき、レプリカを締め付ける際に印象用コーピングに力がかかり、回転しないようにすること。

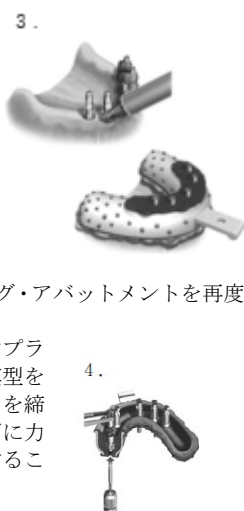

② クローズドトレー法


- 埋入したインプラントに印象用コーピング クローズドトレー用(プラスチック、ロー・プロファイルを含む)または印象用コーピング・バーを装着し、ドライバー・ユニグリップを用いてスクリューを締め付ける。(印象用コーピング ブローネマルクシステムの場合は手で締め付ける。PSの場合はPSアダプタをインプラントに装着して印象用コーピングを用いる)。
- ガイドピンの上部にある穴をブロックアウトする(リプレイスセレクトのみ)。印象用コーピング クローズドトレー用または印象用コーピング・バーが正しく装着されているかはX線撮影によっても確認できる。
- 各印象用コーピングの周囲およびトレー内に精密印象材(ポリエーテル材またはポリビニルシロキサン)を注入し、印象採得する。
- 印象を取り外す。
- 印象用コーピング クローズドトレー用または印象用コーピング・バーを取り外し、それに対応するインプラントレプリカに装着する。
- 印象用コーピング クローズドトレー用または印象用コーピング・バーとインプラントレプリカを連結したものを印象面に再挿入し、主模型を作製する。

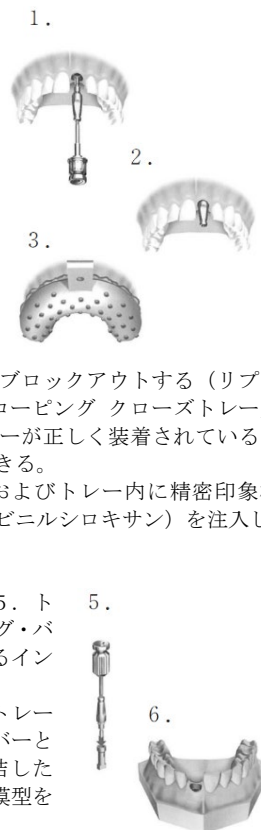

II. アバットメントレベル

① オープントレー法

- ガイドピンを使用して、印象用コーピング マルチユニット オープントレー用をアバットメントに装着する。
- 印象用コーピングの周囲に弾性印象材を注入し、トレーに印象材を充填する。
- 印象材が硬化したら、ガイドピンを「カチッ」という音がするまで、完全に緩めて印象を除く。
- 印象にずれがないことを確認する。
- アバットメントレプリカを、ガイドピンで印象用コーピングに装着する。

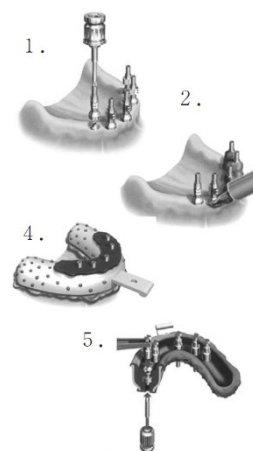

② クローズドトレー法

- マルチユニットアバットメントに印象用コーピングマルチユニット クローズドトレー用または印象用コーピング・バー マルチユニット クローズドトレー用を配置し、完全に装着されるまで締め付ける。
- 弾性印象材とトレーで印象を採得する。印象材が完全に硬化したら印象を除去し、ずれがないかを確認する。
- マルチユニットアバットメントから印象用コーピング マルチユニット クローズドトレー用または印象用コーピング・バーを外し、それぞれのコーピングにアバットメントレプリカを装着する。



4. アバットメントレプリカと印象用コーピングまたは印象用コーピング・バー マルチユニット クローズトレー用を連結したものを、印象面の元の位置に戻す。印象のアンダーカットがぴったりとフィットするようにアバットメントレプリカと印象用コーピングまたは印象用コーピング・バーを連結したものを印象に完全に固定すること。

※ 本品を術中に使用する際には以下の滅菌方法に従って滅菌を行うこと。

〔洗浄及び滅菌方法〕

市販の医療器具洗浄剤とともに、5 分間の超音波洗浄を行った後、流水下で十分洗浄し、完全に乾燥してから、滅菌バッグに入れて滅菌する。

滅菌法：高圧蒸気滅菌すること。

滅菌条件：

予備真空がある場合：温 度：132～134℃
暴露時間： 4 分間以上
乾燥時間：20 分間以上

予備真空がない場合：温 度：132～134℃
暴露時間：20 分間以上
乾燥時間：30 分間以上

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 過剰な外圧をかけないこと。
(2) 本品の未滅菌製品を口腔内に適用する前および再使用する際には必ず洗浄・滅菌すること。なお、プラスチック製品は使用により変形する恐れがあるので再使用しないこと。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラント及び関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118