

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

## サージカルドレープキット


再使用禁止

H36 I

### 【禁忌・禁止】 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、以下の製品で構成される。

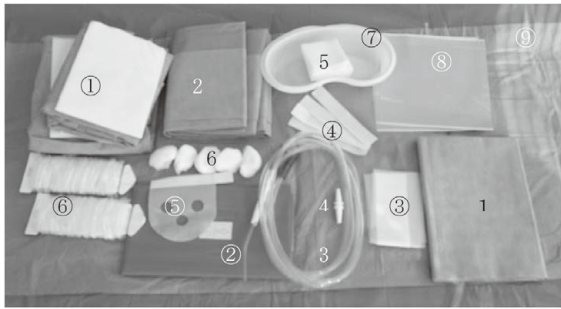

品番12T7400

以下の製品で構成されている。

1. オイフ100×100cm（1枚）
2. 患者用穴開オイフ（1枚）  
（付属品）
3. サクションチップ付チューブ（1本）<sup>1)</sup>
4. サクション用コネクター（1本）<sup>1)</sup>
5. ガーゼ（20枚）<sup>2)</sup>
6. ガーゼ球（5個）<sup>2)</sup>

（その他の装備品）

- ①ガウン／タオル（2組）
- ②メイヨスタンドカバー（1枚）
- ③エンジン用透明シート（1枚）
- ④粘着テープ（4枚）
- ⑤チューブホルダー（1枚）
- ⑥コードカバー（2枚）
- ⑦プラスチックトレイ（1個）
- ⑧透明粘着シート（3枚）
- ⑨内包材兼器械台カバー（1枚）

<sup>1)</sup>（一般的名称）単回使用歯科用吸引カニューレ

<sup>2)</sup>（一般的名称）医療ガーゼ

### 【原材料】

| 番号   | 原材料           |
|------|---------------|
| 1, 2 | ポリエステル        |
| 3, 4 | ポリ塩化ビニル、ABS樹脂 |
| 5, 6 | 綿             |

### 【使用目的又は効果】

本品は、手術室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具である。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。

### 【使用方法等】

1. 本品を器械台の上に置き開封する。
2. 手洗い後にガウンを着用する。
3. 本品の内容物を適切な位置に配置する。
4. メイヨスタンドをメイヨスタンドカバーで覆う。メイヨスタンドカバーはブラケットテーブルを覆うためにも使用できる。
5. 粘着テープを使って患者の口の周囲に患者用穴開きオイフを固定し、チューブホルダーにサクションチップ付チューブを通す。
6. 患者用穴開きオイフの適切な位置にチューブホルダーを固定する。
7. サクションチップ付チューブを歯科専用装置に連結する。
8. 透明粘着シートをライトハンドルに貼り付ける。

### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意  
(1)本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 本品は、ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。
4. 包装に傷、ピンホール等の破損が認められる等の場合には、当該製品の使用を避けること。
5. 使用後は感染防止に配慮し、安全な方法で処分すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118

取扱説明書を必ずご参照ください。

H36 I