

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

サージカル ドレープキット

再使用禁止

H185 B

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、以下の製品で構成される。



品番12.E1619.00

以下の製品で構成されている。

1. オイフ50×50cm（1枚）
2. 粘着テープ付き患者用Uシェイプオイフ（1枚）
3. 粘着テープ付きオイフ75×90cm（1枚）

（付属品）

4. サクションチップ付きチューブ（1本）
5. サクション用コネクター（1本）

（その他の装備品）

- ①ガウンXLタオル付（1枚）
- ②ガウンMタオル付（1枚）
- ③エンジン用透明シート（1枚）
- ④青色透明粘着シート（2枚）
- ⑤コードカバー（1個）
- ⑥汚物処理袋（1枚）
- ⑦包材兼器械台カバー（1枚）

【原材料】

1, 2, 3	不織布（ポリプロピレン、ポリエチレン）
4	ポリ塩化ビニル（チューブ） ポリプロピレン（サクションチップ）
5	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、手術室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具である。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。

【使用方法等】

1. 本品を器械台の上に置き開封する。
2. 手洗い後にガウンを着用する。
3. 本品の内容物を適切な位置に配置する。
4. オイフで手術室にあるテーブルなどを覆う。
5. 粘着テープを使って患者の口の周囲に粘着テープ付き患者用Uシェイプオイフを固定する。
6. エンジン用透明シートをドリルユニットなどのディスプレイに貼り付ける。
7. サクションチップ付チューブを歯科専用装置に連結する。
8. 青色透明粘着シートをライトハンドルに貼り付ける。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 本品は、ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。
4. 包装に傷、ピンホール等の破損が認められる等の場合には、当該製品の使用を避けること。
5. 使用後は感染防止に配慮し、安全な方法で処分すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118

取扱説明書を必ずご参照ください。

H185 B