

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

プロセラ技工用器具
〈プロセラアバットメント オクタゴン〉

H88 J

【禁忌・禁止】

・他社製品と組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

本品は以下の製品で構成される。

1. ノーベルプロセラアバットメント ワックスアップ プラットフォーム オクタゴン



種 類		製品番号
4.8		31565
6.5		35507
BL	NC	35499
	RC	35503

2. ノーベルプロセラ ワックスアップ スリーブ エンゲージング オクタゴン



種 類		製品番号
エンゲージング オクタゴン	4.8	31983
	6.5	35738
	BL	NC 35531
		RC 35532
	B-3	NC3.3MZ 36148
		RC4.1/4.8MZ 36149
		4.8MZ 36150
	4.8MZ	36150

【原材料】

構成部品番号	原材料
1	ステンレススチール
2	ポリエーテルエーテルケトン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

ワックスアップによる方法

- ノーベルプロセラ ワックスアップ スリーブ エンゲージング オクタゴンを症例に応じて調整する。
- 調整したノーベルプロセラ ワックスアップ スリーブ エンゲージング オクタゴンを、ワックスを用いて最終的なアバットメントの形に整える。
- ワックスアップしたノーベルプロセラ ワックスアップ スリーブ エンゲージング オクタゴンをノーベルプロセラアバットメント ワックスアップ プラットフォーム オクタゴンに連結し、それをプロセラスキャナーに用いるホルダーに固定する。スキャニングの前にノーベルプロセラ ワックスアップ スリーブ エンゲージング オクタゴンの中央にあるアクセスホールは、ワックスで仮封する。
- ホルダーのマークとベースプレートのマークを合わせながら、ホルダーをプロセラスキャナーにセットし、プログラムを起動させてスキャニングする。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- 過剰な外圧をかけたりしないこと。
 - 歯科の従事者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技及びその手順について十分に熟知した後に使用すること。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラント及び関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

【保管方法及び有効期間等】

- 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118

取扱説明書を必ずご参照ください。

H88 J