

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用機材 70757000プロセラ技工用器具
(アバットメントスクリュー)

H201A

【禁忌・禁止】

- ・専用品以外と組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

本品は以下の製品で構成される。

1. アバットメントスクリュー ラボ CC



種類	製品番号
NP	301722
RP/WP	301724

【原材料】

チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. スクリューによる固定方法
- 1.1 スクリュードライバーを用いてアバットメントスクリューをプロセラアバットメント接合部にねじ込む。
スクリューを装着したアバットメントをインプラントレプリカに取付け、抵抗が感じられるようになるまでスクリューをインプラントレプリカに固定する。
- 1.2 補綴用トルクレンチ*及びマシン用ドライバー*を使用して35Ncmの力でアバットメントスクリューを締める。

注) *印は自社指定品を用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・過剰な外圧をかけたりしないこと。
 - ・歯科の従事者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技及びその手順について十分に熟知した後に使用すること。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止(専用品以外併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラントおよび関連部品。	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: エンビスタジャパン株式会社
電話番号: 0120-147-118

取扱説明書を必ずご参照ください。

H201A