

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000
プロセラ スキャナーパーツ3

H148 D

【禁忌・禁止】

・他社製品と組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具で、以下の製品で構成される。

1. ノーベルプロセラアバットメント ポジションロケーター

①トリプルアイ インターナル
〈3.4〉



種類	製品番号
3.4	35556

〈4.1/5.0/6.0〉



種類	製品番号
4.1/5.0/6.0	35557

②トリプルアイ エクスターナル



種類	製品番号
3.4	35560
4.1/5.0/6.0	35933

③カムK



種類	製品番号
3.3	35576
3.8	35577
4.3	35578
5.0/6.0	35579

④エスベント



種類	製品番号
3.5	35568
4.5	35569
5.7	35570

2. ノーベルプロセラアバットメント ワックスアップ プラットフォーム

①トリプルアイ インターナル



種類	製品番号
3.4	35917
4.1/5.0/6.0	35922

②トリプルアイ エクスターナル



種類	製品番号
3.4	35492
4.1/5.0/6.0	35494

③カムK



種類	製品番号
3.3	37143
3.8	37144
4.3	37145
5.0/6.0	37146


④エスベント




種類	製品番号
3.5	35517
4.5	35518
5.7	35519

3. ノーベルプロセラ ワックスアップスリーブ エンゲージング

①トリプルアイ インターナル
〈3.4/4.1〉

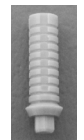


〈5.0/6.0〉

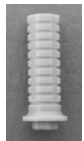


種類	製品番号
3.4	35525
4.1	35528

種類	製品番号
5.0	35526
6.0	35527

②トリプルアイ エクスターナル
〈3.4/4.1〉

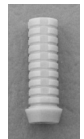


〈5.0/6.0〉

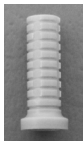

種類	製品番号
3.4	35529
4.1	35930


種類	製品番号
5.0	35927
6.0	35928

③カムK
〈3.3/3.8/4.3/5.0/6.0〉

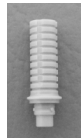

種類	製品番号
3.3	36498
3.8	36499
4.3	36500
5.0	36501
6.0	36502


〈PS〉

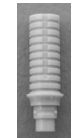

種類		製品番号
PS	3.8	36595
	4.3	36596
	5.0	36597
	6.0	36598

取扱説明書を必ずご参照ください。

④ エスベント

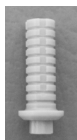

種類	製品番号
3.5	35534
4.5	35535
5.7	35536

4. 付属品：スクリュー

① トリプルアイ
インターナル



② トリプルアイ
エクスターナル



③ カムK



④ エスベント



	種類	製品番号
①	トリプルアイ インターナル	36020
②	トリプルアイ エクスターナル	36022
③	カムK	3.3/3.8/4.3
		5.0/6.0
④	エスベント	36024

5. プロセラアバットメント ワックスアップキット カムK用
(キット番号：33565)



種類	製品番号
ノーベルプロセラアバットメント ワックスアップ プラットフォーム カムK	3.3
	3.8
	4.3
	5.0/6.0

付属品（医療機器に該当しない）

ノーベルプロセラアバットメント ワックスアップ ボックス	
---------------------------------	--

【原材料】

構成部品番号	原材料
1. 4	チタン合金
2	ステンレススチール
3	ポリエーテルエーテルケトン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

・プロセラ アバットメントの作製

A. ワックスアップによる方法

1. ノーベルプロセラ ワックスアップスリーブ エンゲージングは症例に合わせて高さを調整する。
2. 調整したノーベルプロセラ ワックスアップスリーブエンゲージングは、ワックスを用いて最終的な補綴物の形状に整える。

3. ワックスアップしたノーベルプロセラ ワックスアップスリーブ エンゲージングをノーベルプロセラアバットメント ワックスアップ プラットフォームにスクリューを用いて装着する。ノーベルプロセラ ワックスアップスリーブ エンゲージングの中央にあるアクセスホールはワックスで仮封する。
4. これをノーベル プロセラ スキャナーのPIB・アバットメント・ホルダーに装着し、頬側のスキャンを行う。
5. PIB・アバットメント・ホルダーを反転させ、舌側のスキャンを行う。
6. スキャンデータをコンピュータに記憶させる。

B. CADDデザインによる方法

1. 模型に取り付けられたインプラントレプリカにノーベルプロセラアバットメント ポジションロケータを装着する。
2. それをノーベル プロセラ スキャナーのモデルホルダーに設置してスキャンを行い、インプラントの位置と角度を計測する。
3. スキャンデータをコンピュータに記憶させる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 歯科の従事者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。[著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがある。]
- (2) 過剰な外圧をかけないこと。
- (3) 使用者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技およびその手順について十分に熟知した後使用すること。
- (4) 組み合わせて使用する製品類は、適度な嵌合状態を保つことを術前に確認すること。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラントおよび関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンピスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118