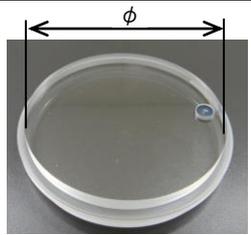
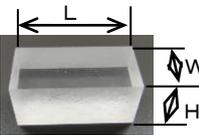
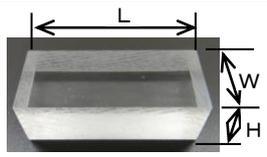


歯科材料 08 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

エベレスト C-Cast

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

名称	形状	寸法(mm)
C-Cast Ronde (100/20)		直径(ϕ): 100 厚さ: 20
C-Cast Blank (B42/20)		42.5(L) × 20(W) × 20(H)
C-Cast Blank (B60/20)		60.2(L) × 25.2(W) × 20(H)

2. 原材料: ポリメチルメタクリレート

【使用目的又は効果】

歯科用模型および修復物の作成過程で用いる各種高分子からなる材料である。

【使用方法等】

- CAD 装置により、模型をスキャンする。
- スキャンしたデータを基に専用ソフトウェアで铸造用パターンを設計し、CAM 装置にデータを転送する。
- 本品を専用の工具を用いて CAM 装置に取り付ける。
- CAM 装置で本品を切削する。
<CAD パラメーター>
エッジ部厚さ: 0.3mm 以上
フレーム厚さ: 0.6mm 以上
移行部: 1.0mm 以下
- 切削終了後、本品を CAM 装置から取り出す。

【組み合わせて使用する医療機器】

販売名 (一般的名称)	届出番号
エベレスト CAD/CAM システム pro (歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット)	27B1X00149000018

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵マスクなどを使用すること。
- 目の損傷を防ぐため、保護めがねなどを着用すること。
- 適切な種類のミリングピンを選択し、指定の CAD/CAM システムで使用すること。

- ミリングピンの交換時には、ミリングピンの先端に触れないように注意すること。
- エベレスト CAD/CAM システム pro の取扱説明書を参照すること。
- 埋没及び铸造については、埋没材の取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 本品を患者の口腔内に使用しないこと。
- メチルメタクリレートにアレルギーを持つ場合は、皮膚を十分に保護すること。
- 本品の使用により、過敏症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 本品の粉塵が万一目に入った場合、大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 直射日光及び放射線を避け、乾燥した清潔な場所で保管する。
- 本品に 10kg 以上の物を置かないこと。

【輸送・保管条件】

温度: -20℃~+55℃
湿度: 5~95% (結露なし)
気圧: 700~1060hPa

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7480
製造業者 : カボデンタル社
(KaVo Dental GmbH)
国名 : ドイツ (Germany)