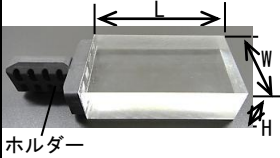


歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

カボ C-Cast

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

名称	形状	寸法(mm)
C-Cast ブランク (B70/20) アークティカ用		70 (L) × 40 (W) × 20 (H)

2. 原材料 : ポリメチルメタクリレート

【使用目的又は効果】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、
歯科修復物の作製過程で使用する鋳造用パターンの作製に用い
る。

【使用方法等】

- CAD 装置により、模型をスキャンする。
- スキャンしたデータを基に専用ソフトウェアで鋳造用パ
ターンを設計し、CAM 装置にデータを転送する。
- 本品を専用の工具を用いて CAM 装置に取り付ける。
- CAM 装置で本品を切削する。
＜CAD パラメーター＞
エッジ部厚さ : 0.3mm 以上
フレイム厚さ : 0.6mm 以上
移行部 : 1.0mm 以下
- 切削終了後、本品を CAM 装置から取り出す。

【組み合わせて使用する医療機器】

販売名 (一般的名称)	届出番号
アークティカ CAD/CAM システム (歯科技工室設置型コンピュータ支 援設計・製造ユニット)	27B1X00149000064

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵
マスクなどを使用すること。
- 目の損傷を防ぐため、保護めがねなどを着用すること。
- 適切な種類のミリングピンを選択し、指定の CAD/CAM システ
ムで使用する。
- ミリングピンの交換時には、ミリングピンの先端に触れない
ように注意すること。
- アークティカ CAD/CAM システムの取扱説明書を参照するこ
と。
- 埋没及び鋳造については、埋没材の取扱説明書を参照するこ
と。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 本品を患者の口腔内に使用しないこと。
- メチルメタクリレートにアレルギーを持つ場合は、皮膚を十
分に保護すること。
- 本品の使用により、過敏症状があらわれた場合には、直ちに
使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 本品の粉塵が万一目に入った場合、大量の流水で洗浄し、眼
科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 直射日光及び放射線を避け、乾燥した清潔な場所で保管す
る。
- 本品に 10kg 以上の物を置かないこと。

【輸送・保管条件】

温度 : -20℃ ~ +55℃
湿度 : 5 ~ 95% (結露なし)
気圧 : 700 ~ 1060hPa

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7480
製造業者 : カボデンタル社
(KaVo Dental GmbH)
国名 : ドイツ (Germany)