


機械器具 64 歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ 31848000
ペリオプローブ

【形状・構造及び原理等】

先端が色別されたスケールになっており、先端を歯周ポケットに入れ、歯周ポケットの深さを測定することができる。

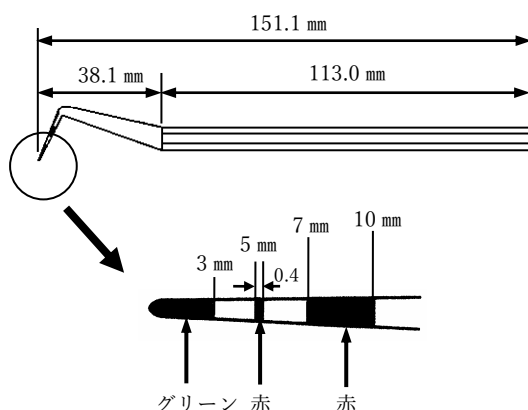

材 質：ポリフェニルサルホン（PPSU）

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

【使用方法等】

先端を歯周ポケットに差し込み、ポケットの深さを測定する。

【使用上の注意】

- ・ フェノール類を含む薬液は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**


- ・ 洗浄、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となることがある。

【有効期間】

- ・ 60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
 - ・ 使用後は、感染防止のため洗浄・滅菌すること。
 - ・ 先端のカラーコードの色落ちが進んだ場合、破棄すること。

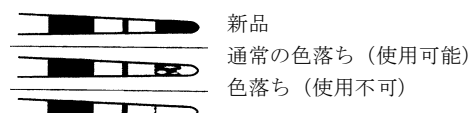

2. 洗浄・消毒
 - 1) 使用後は、先端を下向きにし、目視で確認できる汚れ、血液や唾液等を器具からブラシ等を用いて温水や洗剤で取り除く。
 - 2) 確認して、まだ汚れが残っていれば、1) を繰り返し洗浄する。
 - 3) あるいは超音波洗浄器で洗浄する。
 - 4) 汚れが除去されていることを確認後、プラスチック用の消毒剤を用いて薬液消毒を行う。
 - 5) 温水ですすぎ、乾かす。
 - 6) あるいは 1)～5) の代わりに器具除染用洗浄器(ウォッシャー・ディソジェクター)で洗浄及び熱消毒(93℃)を実施する。
3. 滅菌

高圧蒸気滅菌（134℃、3 分間）を実施する。

【保守・点検に関する注意事項】

1. 洗浄、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
2. 損傷を避けるため、洗浄、消毒、滅菌中は、できるだけ器具を容器やトレイの中で固定して置くこと。
3. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。
4. ケミクレープは行わないこと。
5. 洗浄器を使用する際には、洗浄器の取扱説明書及び注意書きをよく読み、使用すること。
6. 滅菌中は、高圧蒸気滅菌器の金属部分に接触しないように注意すること。
7. 高温(134℃以上)での乾燥は、器具の材質に影響を与えるので、乾燥工程は高温で行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6866-7272
製造業者：カー・ハーヴェ社（KerrHawe SA）
国名：スイス（Switzerland）