


機械器具 64 歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ 31848000
クリックプローブ

【形状・構造及び原理等】

歯周ポケットに挿入する先端はカラスケールになっており、深さを測定することができる。スケールはグリーンとブルーの 2 種類があり、先端の角度、目盛の幅が異なる。カラスケールの色調は先端から徐々に薄くなっている。プローブの先端を歯周ポケットに入れた際、20～25g の圧力がかかると、クリック部分がカチッという音を発するので、常にほぼ一定の圧力で歯周ポケットの深さを計測することができる。

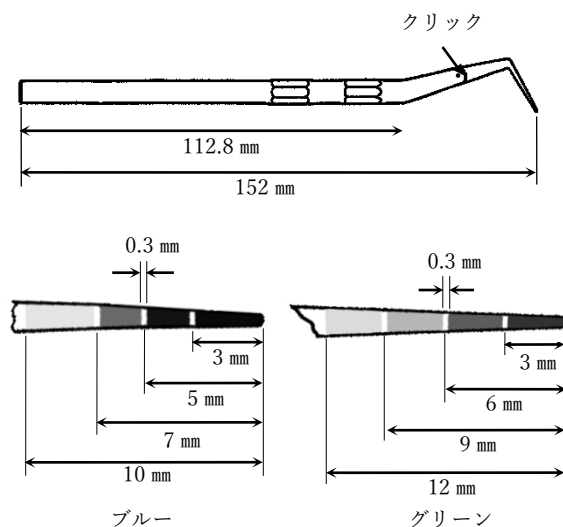

材質：ポリサルホン（PSU）

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

【使用方法】

先端を歯周ポケットにカチッと音がするまで差し込み、ポケット深さを測定する。

【使用上の注意】

長時間、液体に浸さないこと。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**


洗浄、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。

【有効期間】

- ・ 60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
- 使用期限は、包装に記載。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後の点検
 - ・ 破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
 - ・ 使用後は、感染防止のため洗浄・滅菌すること。
 - ・ 先端のカラーコードの色落ちが進んだ場合、破棄すること。

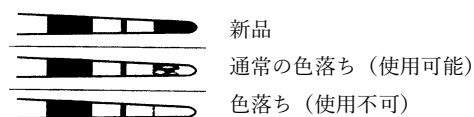

- 洗浄・消毒

- 1) 使用後は先端を下向きにし、目視で確認できる汚れ、血液や唾液等を器具からブラシ等を用いて温水や洗剤で取り除く。
- 2) 確認して、まだ汚れが残っていれば、1) を繰り返し洗浄する。
- 3) あるいは超音波洗浄器で洗浄する。
- 4) 汚れが除去されていることを確認後、プラスチック用の消毒剤を用いて薬液消毒を行う。
- 5) 温水ですすぎ、乾かす。
- 6) あるいは 1)～5) の代わりに器具除染用洗浄器(ウォッシャー・ディソフエクター)で洗浄及び熱消毒(93℃)を実施する。

- 滅菌

高圧蒸気滅菌（134℃、3 分間）を実施する。

【保守・点検に関する注意事項】

1. 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
2. 損傷を避けるため、洗浄、消毒、滅菌中は、できるだけ器具を容器やトレイの中で固定して置くこと。
3. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。
4. ケミクレーブは行わないこと。
5. 洗浄器を使用する際には、洗浄器の取扱説明書及び注意書きをよく読み、使用すること。
6. 滅菌中は、高圧蒸気滅菌器の金属部分に接触しないように注意すること。
7. 高温(134℃以上)での乾燥は、器具の材質に影響を与えるので、乾燥工程は高温で行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カポデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6866-7272
製造業者：カー・ハーヴェ社（KerrHawe SA）
国名：スイス（Switzerland）