

歯科材料（9）歯科用研削材料  
 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000  
**スーパーアクリルポリッシャー**

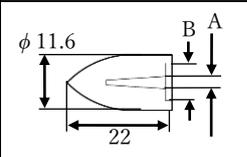
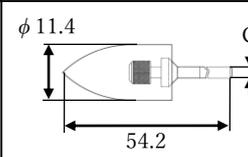
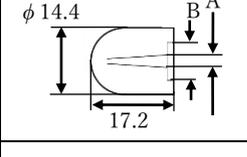
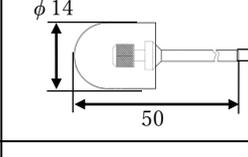
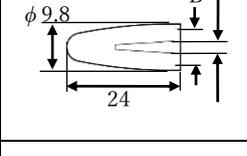
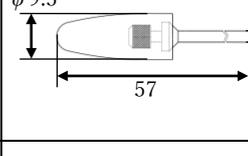
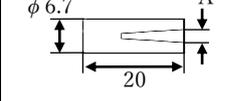
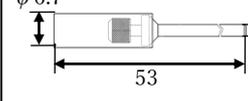
### 【形状、構造及び原理等】

本製品の作業部形状は4種類あり、研磨材粒度は、細かいファイ  
 ンと、粗いコースの2種類がある。研磨材粒度は作業部の色で識  
 別できる。

（ファイン：ライトブルー、コース：ダークブルー）

又、全ての形状に軸無しと軸付きがある。

使用回転数：10,000回転／分以下。（注水無し）

種類	軸無し	軸付き
フレーム		
グレネイド		
ナローフレーム		
シリンダー		

A：φ2.6 B：φ8 C：φ2.35 （単位：mm）

材質 作業部：シリコンム 軸部：ステンレスチール  
 研磨材：炭化ケイ素、酸化アルミニウム、ダイヤモンド砥粒

### 【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材。

### 【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装  
 着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付け  
 て研削、研磨する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- 1) 使用回転数を超えた使用の場合には、破損してけがをする  
 おそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に  
 奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。

- 3) 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過  
 度の加圧での使用は避けること。
- 4) 軸無しは、繰り返しの使用によりマンドレルが抜けやす  
 くなるので、使用前に必ず緩みがないか確認すること。

### 【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、  
 使用しないこと。
- ・ 安全のために、保護めがねなどを使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧  
 （物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

〔有効期間〕

- ・ 60ヶ月〔自己認証（製造元データ）による〕  
 使用期限は、包装に記載。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社  
 連絡先：03-6866-7272  
 製造業者：カー・ハーヴェ社（KerrHawe SA）  
 国名：スイス（Switzerland）